

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000
ディスペンシングピン (DP-1500)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止

【使用上の注意】

＜不具合・有害事象＞

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

〔重大な不具合〕

- ・ 製品の変形、破損、ひび割れ等
- ・ 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・ 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管。
2. 使用期間
 - ・ 使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

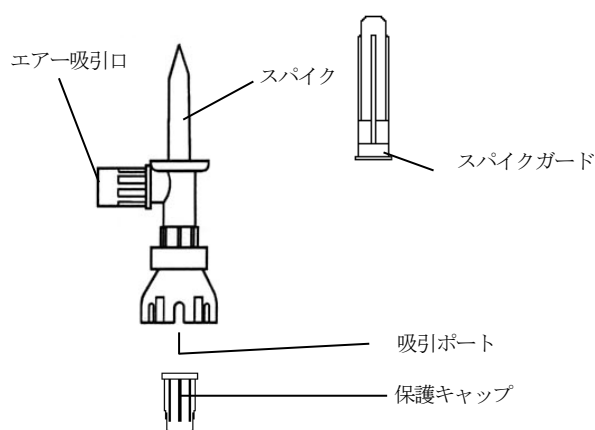
製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

** 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ
B.Braun Medical Inc.

【形状・構造及び原理等】

＜構造図（代表例）＞

**＜材質＞**

- ・ 本体：ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

薬液を容器から他の薬液容器に移すために使用する。

***【使用方法等】**

1. 汚染に十分注意した上で包装内から本品を取りだし、本品のスパイクガードを取り外す。
2. スパイク部をバイアルのゴム栓部に穿刺する。
3. 吸引ポートの保護キャップをとり、接続部の汚染に注意しながら、清潔なシリンジを吸引ポートに接続する。
4. 薬液の容器を逆さまにして、必要量の薬液を吸引する。
5. シリンジを取り外します。シリンジを取り外すと自動的に吸引ポートのバルブが閉じる。
6. 消毒用アルコールなどで吸引ポート部を消毒する。
7. 使用後は、滅菌済みの新しい保護キャップを吸引ポート部に接続する。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用の際は、必ず清潔操作を行うこと。吸引ポートの内側は指などで絶対に触らないこと。
2. 本デバイスは、複数の輸液容器での使用を避け、輸液容器毎に、新品を使用すること。
3. 24 時間以内でのデバイス交換を推奨する。
4. 金属針等を使用して吸引ポートに接続し薬液を吸引しないこと。
5. 本品を患者へ接続されている輸液ラインに、直接接続して使用しないこと。
6. プラスティックボトル及びバックでの使用禁止[液漏れする可能性がある。]