

機械器具 74 医薬品注入器  
一般医療機器 薬液調整用器具 70381000  
**ディスペンシングピン**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

- 再使用禁止

**【使用上の注意】**

＜不具合・有害事象＞

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

[重大な不具合]

- 製品の変形、破損、ひび割れ等
- 液漏れ

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 保管方法
  - 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
2. 使用期間
  - 使用期限は外箱に記載。〔自己認証による。〕

**\*【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

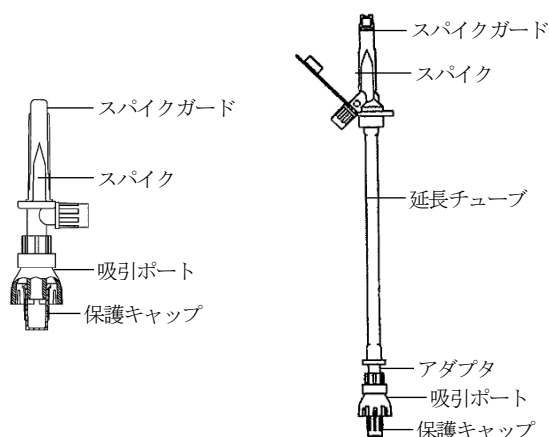
製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

\* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル インク、米国

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

＜構造図（代表例）＞

**\*\*＜材質＞**

- スパイク：ABS樹脂、ポリカーボネート、ステンレススチール、シリコーン樹脂
- \*\* 延長チューブ：ポリ塩化ビニル
- 吸入ポート：ポリカーボネート、シリコーン樹脂、フルオロシリコーンゴム

**【使用目的又は効果】**

薬液を容器から他の薬液容器に移すために用いる。

**【使用方法等】**

1. 汚染に十分注意した上で包装内から本品を取りだし、本品のスパイクガードを取り外す。
2. スパイク部を輸液バックもしくは薬液バイアルのゴム栓部に穿刺する。
3. 吸引ポートの保護キャップをとり、接続部の汚染に注意しながら、清潔なシリンジを吸引ポートに接続する。
4. 薬液の容器を逆さまにして、必要量の薬液を吸引する。
5. シリンジを取り外す。シリンジを取り外すと自動的に吸引ポートのバルブが閉じる。
6. 消毒用アルコール等で吸引ポート部を消毒する。
7. 使用後は、滅菌済みの新しい保護キャップを吸引ポート部に接続する。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**

1. 使用の際は、必ず清潔操作を行うこと。吸引ポートの内側は指等で絶対に触らないこと。
2. 本デバイスは、複数の輸液容器での使用を避け、輸液容器毎に、新品を使用すること。
3. 24 時間以内でのデバイス交換を推奨する。
4. 金属針等を使用して吸引ポートに接続し薬液を吸引しないこと。
5. 本品を患者へ接続されている輸液ラインに、直接接続して使用しないこと。
6. プラスティックボトル及びバックでの使用禁止〔液漏れする可能性がある。〕