

機械器具 74 医薬品注入器
一般医療機器 調整用薬液注入コネクタ 70396000
ディスペンシングコネクタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

***【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL.0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル社 アメリカ

B.Braun Medical Inc. USA

【形状・構造及び原理等】

<構造図（代表例）>



<材質>

- 本体：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

血液バッグや薬液容器などに装着して、バッグ内や薬液容器などに薬液などを注入・排出するために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

- 汚染に十分注意した上で包装内から本品を取り出す。
- 接続部分には手を触れないように十分注意しながら、シリンジや薬液容器等のオスルアー部を、本品にしっかりと接続する。
- 反対側に、薬液を移すシリンジや薬液容器等のオスルアー部を本品にしっかりと接続する。
- シリンジや薬液容器を操作して、薬液を移す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 感染予防のため、一旦外した本品は再使用せず、新たな滅菌済み製品を使用することを推奨します。
- ルアースリップタイプのシリンジ等を接続する場合には、使用時の接続外れに注意すること。[ルアーロックタイプの製品の使用を推奨する]

***【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない。

2. 不具合・有害事象

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

<重大な不具合>

- 製品の変形、破損、ひび割れ等
- 液漏れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

- 使用期限は外箱に記載されている。[自己認証（自社データ）による。]