

機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ 70469000
リストメイト


【形状・構造及び原理等】

1. 組成

アルミニウム合金、プラスチック類、プラスチック繊維
ステンレス鋼、ゴム

2. 形状又は構造

本添付文書に該当する製品の型式(商品コード)は包装の表示、
本体マーキング等に記載されています。伝票と照らし合わせて
確認してください。

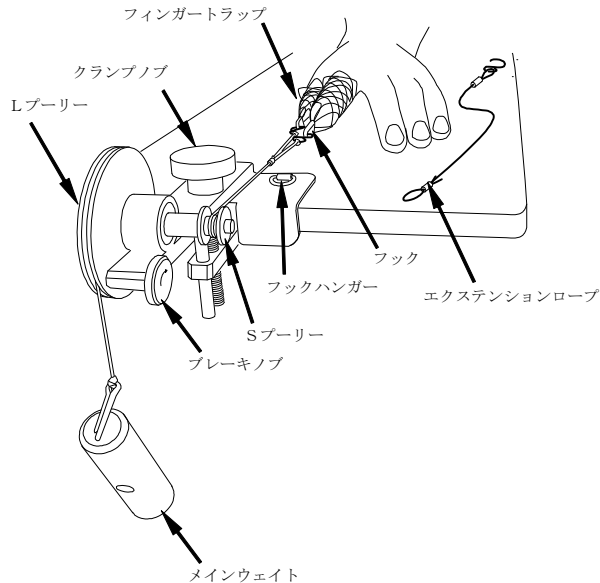

品名	商品コード
リストメイト (本体)	WM-2500
エクステンションロープ	WM2A
交換用ロープキット	WM2B
リストメイト用フィンガートラップ S	WM-11
リストメイト用フィンガートラップ M	WM-12
リストメイト用フィンガートラップ L	WM-13

3. 原理等

手術台にクランプ部を介して取付け、手指に取付けられたフ
ィンガートラップ等にロープを連結し大小プーリー比を利用
しオモリの重量以上の牽引力を得る。
また網目筒状に編まれたフィンガートラップはその中に指を
入れ咥えさせることが出来る。

【使用目的又は効果】

本製品は前腕を牽引することにより、整形外科的処置の補助目的
で使用する。

【使用方法等】

1. 使用前

本製品は未滅菌品の為、使用時に高圧蒸気滅菌を行ってください。

(例)

高圧蒸気滅菌 条件: 温度 121℃
圧力 $9.8 \times 10^4 \text{ Pa}$ (1.0 kg/c m²)
時間 20 分

2. 使用方法

詳細については取扱説明書をご参照ください。

- リストメイト本体を手台に取付け、ノブで固定する。
- 指にフィンガートラップを装着する。
- フックをゆっくり引き出しフィンガートラップに取付ける。
- プーリーをまわして牽引し、テンションをかける。

- メインウェイトをLプーリーから外しゆっくりぶら下げて手
関節を牽引する。
- 手関節を多少動かし支障がないことを確認する。
- 使用方法等に関連する使用上の注意
- 使用前後に可動部の動き、キズ、曲がり、錆び、結合部外れ
等の不具合がないか点検すること。特にロープ部分の曲がり
や傷、ほつれには注意してください。
- 術前に必ずお手持ちの手台に取付可能か確認してください。
特に手台の裏側のフレーム部分に注意してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- フィンガートラップ装着指は牽引中締め付けられているため
虚血状態となります。術中は十分な注意を怠らないこと。
- 連続しての使用時間は1時間を限度とし、必ず血流の再開を
行い、細胞の破綻とクラッシュ症候群(挫滅症候群)には十
分に注意すること。
- フィンガートラップは適切なサイズを選択すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光を避け常温にて保管

【保守・点検に係る事項】

- 使用後はなるべく早く血液、組織等の付着物を除去し、洗
浄すすぎ等を行ったあと感染防止の為、高圧蒸気滅菌を行
い保管すること。
- 洗浄後に摺動部に医療用潤滑剤の塗布等の処理を行ってくだ
さい。
- 洗浄に際しては目視確認しづらい部分(プーリー軸受け部
のボールベアリング等)に異物等がないか確認すること。
- 洗浄方法について
- (1) 洗浄には硬くないブラシ、スポンジ等を用い金属ブラシ、
洗い磨き粉等は使用しないこと。
- (2) 付着物除去に使用する洗浄剤は、医療用等本洗浄に適した
ものを適正な濃度で使用する。
- (3) 洗浄装置を使用して行う時は鋭利な部分同士が接触して、
損傷することがないようにすること
- (4) 袋穴、隙間、勘合部等に異物がないことを確認できるまで
洗浄すること。
- (5) 可動部分を有する本体やフィンガートラップは隙間等に異
物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- (6) 強酸性もしくは強アルカリ性の洗浄剤や消毒液は機器を腐
食させる恐れがあるので使用しないこと。
- (7) 洗浄後は腐食防止の為直ちに乾燥させること。

【主要文献及び文献請求先】

株式会社エム・イー・システム
TEL 03-3375-6767

【製造販売業者及び製造業の氏名又は名称等】

MES 株式会社エム・イー・システム

取扱説明書を必ず御参照下さい