

類 別：機械器具 16 体温計 管理医療機器

一般的名称：電子体温計（JMDN コード 14032010）

エー・アンド・デイ 電子体温計 UT-201


【禁忌・禁止】

（体温計を適正にご使用頂くための注意事項です。）

- ・測定結果の自己判断、治療はしないでください。医師の指示に従ってください。

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名前 UT-201

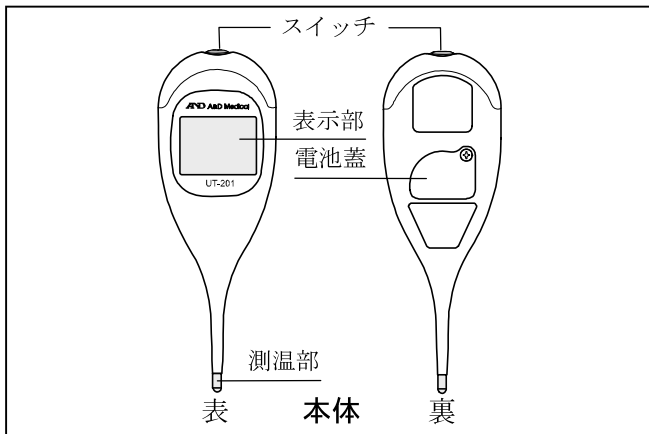

標準付属品

取扱説明書（保証書付き）	1 冊
添付文書	1 枚
モニター用ボタンリチウム電池	1 個

(2) 本体寸法及び重量

寸法	: 116(幅)×40(高さ)×15(奥行き)mm
質量	: 約 24 g (電池含む)

(3) 電氣的定格

電源	: DC3V (CR2016 リチウム電池 1 個)
電撃保護	: 内部電源機器 B F 形

(4) 作動・動作原理

金属カップの温度はサーミスタに伝わり、その温度に応じて抵抗値が変化します。その抵抗値を測定して温度に変換します。本機は、予測式（実測移行式）電子体温計です。体温を測定することができます。

EMC適合 本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2 : 2007 に適合しています。

【使用目的、効能又は効果】

測温部を部位に接触させて腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示します。

【品目仕様等】

測定方式	: 予測（実測移行式）
測定範囲	: 温度 32℃～42℃
精度	: ±0.1℃ (32.0～42.0℃)
機能	: 測定値記憶・呼び出し
使用温湿度	: +10～+40℃、30～85%RH
保存温湿度	: -20～+60℃、30～95%RH

【操作方法・使用方法等】

1. 室温 10～40℃でご使用ください。
2. スイッチ  を押すと、前回メモリ値が表示されます。
3.  が表示されるまで待ってください。
4. 体温計の先端をわきの下の中心にしっかりと押し当ててください。

5. 腋の下を閉じてください。
6. 予測測定が開始し、予測マークが回転し、カウントダウンインジケータが減っていきます。（約 30 秒）
7. 予測測定が終わると予測マークが固定点灯し、LED が点滅、ブザーが鳴ります。約 1 分間予測値が表示されます。
8. スイッチ  を押すとオフします。

【使用上の注意】

- ・室温 10～40℃でご使用ください。
- ・安静にして測定してください。
- ・運動または入浴後は数十分してから測定してください。
- ・体温計を正しく腋の下に押し当ててください。また、衣類の上から測定すると、測定誤差の原因になります。
- ・本機は万が一電源を切り忘れても約 1 分後に自動的に電源が切れる、「オートパワーオフ」機能を備えています。
- ・表示部に電池不測マークが点灯した場合は、電池を新しいものに取替えてください。
- ・直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。空気中に、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ場所で使用しないでください。
- ・携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤作動する可能性があります。
- ・体温測定以外の目的では使用しないでください。分解や修理・改造を行わないでください。発火や故障、事故を起こすことがあります。
- ・他の医療用具や機器と接続しないでください。事故の恐れがあります。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(1) 貯蔵方法

- ・高温・高湿・直射日光は避けてください。
- ・ほこりの多い所での保管は避けてください。
- ・長期間（約 1 ヶ月）使用しない場合は、乾電池を取り出してください。

(2) 使用期限

5 年とする。

【保守・点検に係る事項】

- (1) しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること（電源が入る、ディスプレイが表示されるなど）を確認してからご使用ください。
- (2) 汚れていたり、濡れたりしていないかを確認してください。清掃は乾いた柔らかい布で行ってください。水または中性洗剤を染み込ませた布を使う場合は、硬く絞ってお使いください。シンナー、ベンジン等のアルコール溶剤を使用しないでください。

【包装】

1 台/箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

製造販売業者

名称：株式会社エー・アンド・デイ
住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話：0120-514-016

製造業者

名称：愛安德電子（深圳）有限公司
A&D ELECTRONICS (SHEN ZHEN) CO., LTD.
中華人民共和国

取扱説明書を必ず参照してください。

1WMPD4002543