

機械器具（18）血圧検査又は脈波検査用器具
管理医療機器 自動電子血圧計（JMDN コード：16173000）

トップバリュ デジタル血圧計 UA-651

【禁忌・禁止】


<使用方法>

（血圧計を適正にご使用いただくための注意事項です。）

- ・ 測定結果の自己判断、治療はしないでください。医師の指示に従ってください。[病気が悪化することがあります。]
- ・ 病院内の麻酔ガスなど可燃性ガスの近くで使用しないでください。[引火の可能性があります。]
- ・ 病院内の高圧酸素室や酸素テント内など高濃度酸素下では使用しないでください。[発火の可能性があります。]

【形状・構造及び原理等】

（1）各部の名前 UA-651

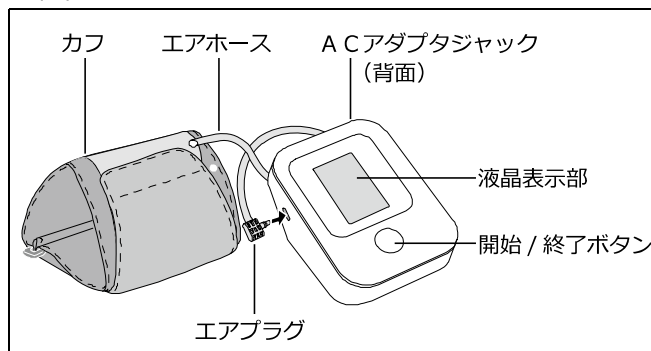

標準付属品

取扱説明書（保証書付き）	1冊
添付文書	1枚
カフ（消耗部品）	1個

（2）体に接触する部分の原材料

カフ：ナイロン、エアホース：PVC

（3）本体寸法及び重量

寸法	: 96(幅)×130(奥行き) ×68(高さ)mm
重量	: 240 g (乾電池を除く)

（4）電氣的定格

電源	: DC6V（単3形乾電池4個） AC100V（ACアダプタ使用時）
電撃保護	: 内部電源機器 BF形装着部（乾電池使用時） クラスⅡ BF形装着部（ACアダプタ使用時）

（5）作動・動作原理

カフ圧力を最高血圧以上に加圧後、徐々に減圧すると、カフ内圧力に心拍に同期した脈動現象が現れます。この脈動は、始めは小さく、減圧に従い大きくなり、やがて最大振幅を示した後、再び小さくなる山型のパターンになります。オシロメトリック方式の血圧計は、この脈動分の振幅波形情報をマイクロコンピュータで解析して最高血圧及び最低血圧を決定しています。

（6）品目仕様等

測定方式	: オシロメトリック方式
圧力測定範囲	: 0～299mmHg
脈拍測定範囲	: 40～180 拍/分
精度	: 圧力 ±3mmHg 以内(カフ内圧力表示の誤差) 脈拍 読み取り数値の±5%以内
測定可能腕周	: 約 22～32cm
動作温湿度	: +10～+40℃、15～85%RH、800～1060hPa
保存温湿度	: -20～+60℃、10～95%RH、700～1060hPa

本製品は JIS T 1115（非観血電子血圧計）及び EMC 規格 IEC60601-1-2：2007 に適合しています。


【使用目的又は効果】

健康管理のために収縮期血圧及び拡張期血圧を非観血的に測定すること。

【使用方法等】


（1）乾電池（別売り）の入れ方

1. 電池フタを矢印の方向にスライドさせ、はずしてください。
2. 新しい単3形乾電池（4個）を⊕・⊖を間違えないように入れてください。
3. 電池フタを矢印の方向にスライドさせ、閉めてください。

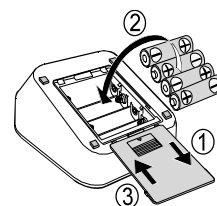


（2）ACアダプタ（別売り）の使い方

1. ACアダプタを電源コンセントに差し込んでください。
2. ACアダプタプラグをACアダプタジャックに差し込んでください。

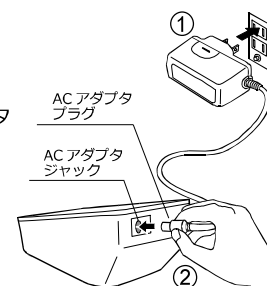

（3）カフの巻き方


1. ひじマークがひじ側にくるようにカフの向きを合わせます。血圧をより正しく測定するために、着衣の袖をまくり上げ素肌に直接巻いてください。厚手の衣類は脱いでからカフを巻いてください。
2. ひじ関節を曲げたときにできるすじから1～2cm上に巻いてください。また、エアホースの中心が中指の延長線上にくるようにしてください。
3. カフと上腕の間に指が1～2本入るすき間ができるようにカフの端を引きながら上腕に巻き付けてください。

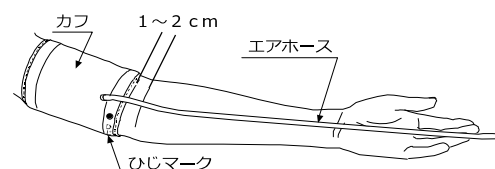


取扱説明書を必ずご参照ください。

(4) 血圧測定方法

1. エアプラグを本体に正しく差し込んでください。
2. 正しい姿勢で座り、カフを心臓の高さと同じにしてください。(クッションなどで高さを調整します。)
3. リラックスして「開始/終了」ボタンを押してください。
全点灯表示した後、自動的に加圧を開始し、測定を行います。

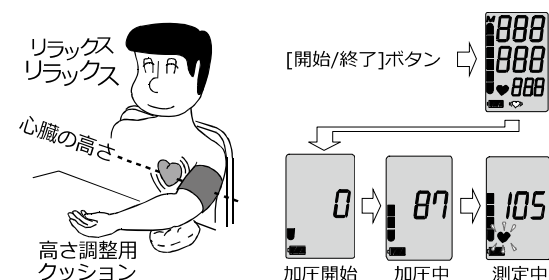

4. 測定が終了すると測定結果と血圧レベル(※1)を表示し、自動的にカフに残った空気を排気します。測定中に不規則な脈が含まれていた場合 IHB マーク(※2)を表示します。

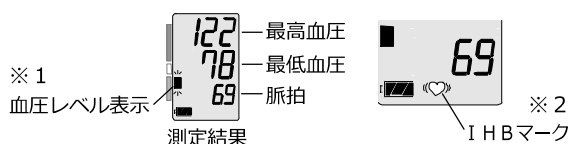

5. 測定を途中で中止したい場合、いつでも「開始/終了」ボタンを押すと測定を中止することができます。
 6. 測定結果を確認したら「開始/終了」ボタンを押して電源を切ってください。(電源を切り忘れても、約1分後に自動的に電源が切れます。)
- (※1~2)…取扱説明書ご参照ください。

【使用上の注意】

<使用注意> (次の患者には慎重に適用すること)

- ・腕に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください。[体調不良をおこす恐れがあります。]
- ・傷など未治癒の腕にカフを巻かないでください。[症状が悪化する可能性があります。]
- ・点滴や輸血を行っている腕にカフを巻かないでください。[怪我や事故をおこす恐れがあります。]
- ・糖尿病、肝臓病、動脈硬化、高血圧症等で末梢循環障害のある場合は血圧値に差が出ることがあります。また測定部位の血流が少ない場合、血管音が非常に小さい場合、不整脈のある場合、血管雑音が多い場合は、使用前に医師に相談してください。[測定値に誤差が生じたり、測定できない可能性があります。]
- ・降圧剤を使用の方は、薬の効果が切れたときに血圧が高くなる場合があります。

<重要な基本的注意>

- ・装置の異常発生時や測定を中断する場合は、「開始/終了」ボタンを押します。(カフから空気が急速に抜け、測定が中止されます。)
- ・正確に測定するために背すじを伸ばして姿勢よく座ってください。カフの高さが心臓の高さと同じになるようにしてください。
- ・リラックスして安静にしてください。
- ・体を動かしたり、おしゃべりをしないでください。
- ・運動後や入浴後は数十分たってから測定してください。
- ・カフは正しく巻かないと測定できない場合があります。また衣類の上から巻くと測定誤差の原因になります。
- ・途中で測定を中止したい場合は、もう一度「開始/終了」ボタンを押すと止まります。
- ・本製品は万一電源を切り忘れても約1分後に自動的に電源が切

れるオートパワーオフ機能を備えております。

- ・表示部の  マークが点滅した場合は、乾電池を4個同時に新しいものと交換してください。

電池残量マーク	
	電池は充分残っています。
	電池は残り少なくなっています。
	表示が点滅する場合は、電池が消耗しています。乾電池を交換してください。

- ・ACアダプタは、専用のもの以外は使用しないでください。
- ・直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください。
- ・ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください。
- ・傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください。
- ・他の医療機器と接続しないでください。事故の恐れがあります。
- ・携帯電話など電磁波を発生する機器を近づけないでください。誤作動の恐れがあります。
- ・本製品は、カフ内圧力が299mmHgを超えるとエラー表示し自動的に急速排気を行い、異常加圧の危険を回避します。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

高温・多湿・直射日光は避けてください。また、ほこりの多いところも避けてください。

長期間(1ヵ月以上)使用しない場合は、乾電池を取り出してください。

<耐用期間>

5年もしくは3万回のいずれか早く達した方とする。

(自己認証による)※消耗部品(カフ)は除く。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による点検事項>

- ・しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること(電源が入る、加圧するなど)を確認してからご使用ください。
- ・汚れていたりぬれていないかを確認してください。汚れは水や中性洗剤をしみこませた布を固く絞って拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社イー・アンド・デイ

住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

電話：0120-514-016

発売元 イオン株式会社

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-28-4196(10~17時:日曜日は除く)