

機械器具（16）体温計

管理医療機器 電子体温計（JMDN コード：14032010）

トップバリュ体温計 UT-114

【警告】

・お子さまだけで使わせないでください。[誤飲やけがの可能性
があります。]


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞（体温計を適正にご使用いただくための注意事項です。）

- ・本商品は人のわきの下専用の体温計です。他の部位で使用しないでください。[正しく測定できません。]
- ・測定結果をもとに自己判断や治療はせずに医師にご相談ください。[病気が悪化することがあります。]

【形状・構造及び原理等】

(1) 各部の名前 UT-114

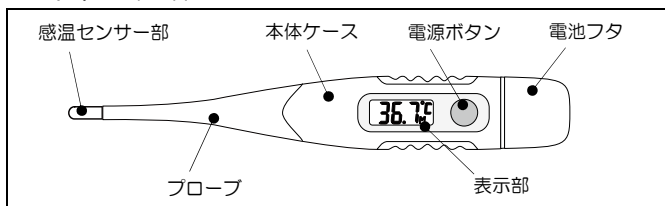

「標準付属品」

取扱説明書（保証書付き）	1 枚
添付文書	1 枚
アルカリボタン電池 LR41（お試用）	1 個
収納ケース	1 個

(2) 体に接触する部分の原材料

感温センサー部：ステンレス
プローブ：エラストマー
本体ケース：ABS

(3) 外形寸法と質量

寸法：128.8(長さ)×18.5(幅)×10.5(厚さ)mm
質量：約 10.3 g（電池含む）

(4) 電気的定格

電源：アルカリボタン電池 LR41 X 1 個（DC1.5V）
電撃保護：内部電源機器 BF 形装着部

(5) 作動・動作原理

感温センサー部の温度はサーミスタに伝わり、温度に応じて抵抗値が変化します。その抵抗値を測定して温度に変換します。本商品は、実測式電子体温計です。

(6) 品目仕様等

種類：一般用、測温部一体型、一部防浸形
測温方式：実測式
測温部位：わきの下
測温範囲：32.0～42.9℃
温度精度：±0.1℃（32.0～42.9℃）、
恒温水槽で実測の場合
使用温湿度：10～40℃ 15～85%RH
保管温湿度：-10℃～60℃ 30～90%RH
測定範囲外表示：32.0℃未満：Lo、42.9℃超：Hi
電池寿命：約 2 年（1 日 10 分使用の場合）

本製品は EMC 規格 IEC60601-1-2：2018 及び JIS 規格 JIS T 1140:2014 に適合しています。

【使用目的又は効果】


測温部を部位に接触させ腋窩の体温を測定、最高温度を保持してデジタル表示すること。

【使用方法等】


1. 本体の電源ボタンを押すと、「ピッ」という音とともに、本体表示部に文字が全表示されます。（2 秒間）
2. 前回値が、「M」マークとともに表示されます。（2 秒間）
3. 「℃」が点滅し、現在の周囲温度が表示されると測定できます。感温センサー部をわきの下のくぼみ中央にあててはさってください。
※Lo は 32.0℃未満、Hi は 42.9℃超を表します。
※（「」マークが「℃」と同時に点滅した場合は、電池が消耗しています。計量法に基づいた正確な測定ができません。新しい電池に交換してください。
※最高温度保持機能のため、体温より高い室温の場合、体温測定できません。
4. 温度上昇がゆるやかになると、終了予告ブザーが「ピーピーピー」と 10 秒間鳴り、「℃」表示が点滅から点灯に変わります。
※終了予告ブザーが「ピピピピピピピピピピ」と 10 秒間鳴った場合は、測定結果が 37.8℃以上だったことをお知らせしています。
※終了予告ブザーが鳴ったら終了です。より正確に測る場合は、約 3 分間測定を続けてください。この時、音は鳴りません。
※測定している時間がオートオフよりも長いと測定中に表示が消える場合があります。その時は、再び電源ボタンを押して前回値（「M」マーク）を見ることで測り直すことなく、体温測定値を確認することができます。
5. 測定終了後、電源ボタンを押して電源を切ります。再度測定する場合も、必ず一旦電源を切り、再度電源を入れてください。

＜電池交換のしかた＞

1. 電池フタをはずします。

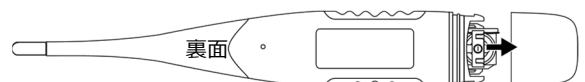


2. 本体側面を指で押さえ、精密ドライバーなどの細い棒で電池を押し出してください。※端子などを傷つけないように注意してください。

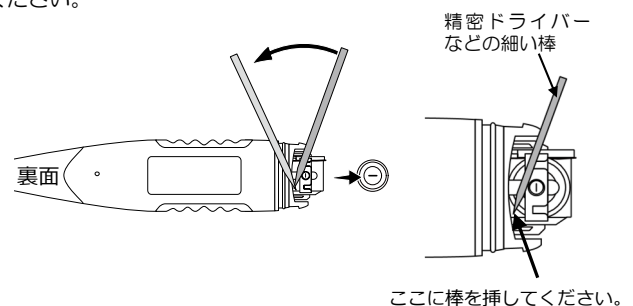


3. 電池のマイナス面を上にして入れます。

マイナス面を上にして押し入れる

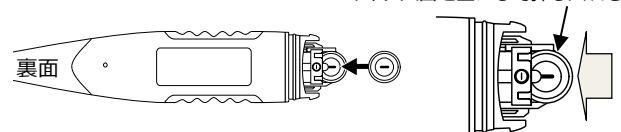

4. 電池フタをはめてください。

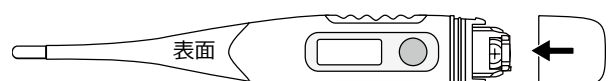

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- ・感温センサー部をわきの下のくぼみ中央にあててはさんでください。[指示通りはさまないと正しく測定できないことがある。]

＜重要な基本的注意＞

- ・本商品および取り外した電池フタ、電池はお子さま、乳幼児、認知症の方の手の届かないところに保管してください。[誤飲の可能性がある。] また、万一電池や電池フタを飲み込んだ際はただちに医師にご相談ください。[体調不良を起こす可能性がある。]
- ・お子さま、乳幼児、認知症の方が本体電池部、電池をなめないように注意してください。[体調不良を起こす可能性がある。]
- ・お子さまだけのご使用は避けてください。[けが・事故の原因となる。]
- ・電池漏液が皮フや衣服についたときはすぐに多量のきれいな水で洗い流してください。[けがの原因となる。]
- ・可燃性・支燃性ガスを使用する環境では使用しないでください。[火災・故障の原因となる。]
- ・本体に強い衝撃を与えないでください。[故障の原因となる。]
- ・暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。[故障の原因となる。]
- ・本商品は防水ではありません。[内部に液体が入ると故障の原因となる。]
- ・強い静電気や電磁波に近づけないでください。[誤作動の原因となる。]
- ・分解・修理・改造をしないでください。[火災・感電・故障の原因となる。]
- ・指定以外の電池を使用しないでください。[故障やけがの原因となる。]
- ・電池の＋－を間違えて使用しないでください。[誤作動・けが・事故の原因となる。]
- ・本体をかんたり、無理に曲げたりしないでください。[けが・事故の原因となる。]

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・掃除のあと、直射日光、高温、高湿度、ほこり、火気、振動や衝撃を受けやすい場所を避けて、乾燥させた状態で収納ケースの中に入れ、室温で保管してください。
- ・1ヵ月以上使用しない場合は、電池を抜いてください。

＜耐用期間＞

5年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による点検事項＞

- ・しばらく使用しなかったときには、使用前に必ず作動すること（電源および表示など）を確認してからご使用ください。
- ・汚れていたりぬれていたりしないかを確認してください。汚れは水や中性洗剤を染み込ませた布を固く絞って拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコール等の溶剤は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社イー・アンド・デイ

住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

電話：0120-514-016

製造業者：VEGA TECHNOLOGIES INC.

発売元 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-28-4196(10~17時:日曜日は除く)

取扱説明書を必ずご参照ください。