

再使用禁止

シールライト

TE101\_2025.02

【警告】

1.本品は可燃性の麻酔ガス、混合空気、又は酸素混合空気のある場所で使用しないこと。[火災や人体への傷害を起こす恐れがあるため]

2.中枢神経系と直接接触する箇所で使用しないこと。[神経障害を来す恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

1.本品の分解・改造は、破損等の原因となるので、絶対に行わないこと。

2.本品は滅菌済み製品で単回使用製品であるため、一度開封したものや、一度使用したものを再滅菌し使用しないこと。[製品の品質低下や汚染の恐れがあるため]

3.使用者の眼球に影響を与える可能性があるため、点灯させたLEDライトを直視しないこと。

4.大量の血液や体液等に長時間接触することは避けること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、冷暗所にて保管すること。


2. 有効期間  
外箱の表示を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ellman-Japan  
〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀一丁目8番33号  
TEL:06-6448-2511 FAX:06-6448-2522  
<https://www.ellman.co.jp>  
[hello@ellman.co.jp](mailto:hello@ellman.co.jp)  
製造業者：Donngguan Kaiser Technology Co., Ltd.(中華人民共和国)

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造  
形状は以下の通りである。  
ストラップ長：100mm、200mm  
電源：LR44アルカリボタン電池 x 4個、6個（DC3V）、  
単4形アルカリ乾電池 x 2本（DC3V）※いずれも電池交換不可

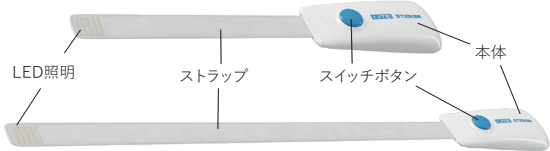

2. 原理  
本体部に設置された電池電源により、スイッチボタンを押して電源を入れることで先端部のLED照明に強い光を発生させる。本品は単回使用の製品であり、電池残量がなくなるまで使用できる。電池交換は不可である。

【使用目的又は効果】  
一般手術又は診療に用いる強い光を発生させる小型携帯ライトで、電池残量がなくなるまで使用できる。

【使用方法等】

1. 使用方法  
(1)本品を滅菌パッケージから取り出す。  
(2)必要に応じてストラップと本体裏面の両面テープを剥がして使用箇所へ設置し、スイッチを押してLED照明を点灯させる。  
(3)電池残量があり電源を切る場合は、再度スイッチを押してLED照明を消灯させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意  
(1)本品は、医師及びその指示に従って使用すること。  
(2)使用前に、傷・損傷・可動部の動き等に異常がないか点検すること。  
損傷・異常がある場合は、使用しないこと。  
(3)使用目的(手術・診療等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。  
また、破損・曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。  
(4)可燃性の麻酔ガスがあるところで本品を使用しないこと。