

シールライト

再使用禁止

【警告】

- 1)本品は可燃性の麻酔ガス、混合空気、又は酸素混合空気のある場所で使用しないこと。[火災や人体への傷害を起す恐れがあるため]
- 2)中枢神経系と直接接触する箇所で使用しないこと。[神経障害を来す恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

- 1)本品の分解・改造は、破損等の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 2)本品は滅菌済製品で単回使用製品であるため、一度開封したものや、一度使用したものを再滅菌し使用しないこと。[製品の品質低下や汚染の恐れがあるため]
- 3)使用者の眼球に影響を与える可能性があるため、点灯させたLEDライトを直視しないこと。
- 4)大量の血液や体液等に長時間接触することは避けること。

2. 有効期間
3年
3. 使用期間
外箱の表示を参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社NEXUS-Arc
TEL:06-6448-2511

製造業者：Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd. 中華人民共和国

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

形状は以下の通りである。

ストラップ長：100mm、200mm

電源：LR44アルカリボタン電池 x 4個、6個（DC3V）、

単4形アルカリ乾電池 x 2本（DC3V）※いずれも電池交換不可

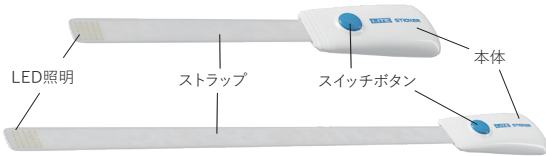

2. 原理

本体部に設置された電池電源により、スイッチボタンを押して電源を入れることで先端部のLED照明に強い光を発生させる。本品は単回使用の製品であり、電池残量がなくなるまで使用できる。電池交換は不可である。

【使用目的又は効果】

一般手術又は診療に用いる強い光を発生させる小型携帯ライトで、電池残量がなくなるまで使用できる。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1)本品を滅菌パッケージから取り出す。
- 2)必要に応じてストラップと本体裏面の両面テープを剥がして使用箇所へ設置し、スイッチボタンを押してLED照明を点灯させる。
- 3)電源残量があり電源を切る場合は、再度スイッチボタンを押してLED照明を消灯させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1)本品は、医師及びその指示に従って使用すること。
- 2)使用前に、傷・損傷・可動部の動き等に異常がないか点検すること。損傷・異常がある場合は、使用しないこと。
- 3)使用目的(手術・診療等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。また、破損・曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 4)可燃性の麻酔ガスがあるところで本品を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1)常温常圧下にて保管すること。
周囲温度の範囲：-25°C ~ 70°C
相対湿度の範囲：10% ~ 95%(結露のないこと)
気圧の範囲：860hPa ~ 1060hPa
- 2)水のかからない場所に保管すること。
- 3)気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分等を含んだ空気等により悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 4)傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)等、安定状態に注意すること。
- 5)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。