

添付文書

2017年10月23日（第3版 新記載要領に基づく改訂）
2015年12月1日（第2版）

医療機器製販売届出番号：13B2X00242000011

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（70908000）

タイザンドリル タイザン CAD/CAM 用

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・他の製品と混用しないこと。
- ・本品に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

組成・形状・機能

種類	組成	機能
3mm ドリル 2mm ドリル	ステンレス鋼	タイザン CAD/CAM システムのミリングで荒削りに使用する。
1mm ドリル 0.6mm ドリル	ステンレス鋼	タイザン CAD/CAM システムのミリングで緻密な削りに使用する。

【使用目的又は効果】

タイザン CAD/CAM システムにおいてセラミックス等の歯科修復物の原材料の切削加工に用いる切削器材である。

【使用方法等】

1. 準備

- (1) タイザンドリル タイザン CAD/CAM 用のドリルの表面の埃、脂分を除去する。

2. セット

- (1) タイザン CAD/CAM システムのタイザンカットのドリル設置場所にドリルを設置する。設置場所 1 番に 3mm (2mm) ドリルを 2 番に 1mm ドリルを 5 番に 0.6mm のドリルの先端を下向きに設置する。
- (2) タイザン CAD/CAM システムのプログラムに従って切削加工を行う。

3. 清掃

- (1) 切削加工が終了したら、ドリルの表面の埃、脂分を除去する。

【使用上の注意】

1 使用上の注意

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 本品で材料を研磨、整形する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどの保護具を使用すること。
- (3) 本品で研磨、整形する際は粉塵を吸引しないよう、防塵マスク等を着用すること。

2. 重要な基本的注意

- (1) 本品の研削による粉塵が、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 本品は、高温、多湿、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、保管すること。
- (2) 本品は、歯科医療従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

2. 使用期限

本品は、包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。
[記載の使用期限は輸入先製造業者データによる。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元 株式会社エーティーディー・ジャパン
TEL 03-5319-1581
FAX 03-5319-1582

2. 製造元 Schütz Dental GmbH (国名：ドイツ)