

添付文書

**2017年10月23日(第4版 新記載要領に基づく改訂)

*2015年12月1日(第3版)

医療機器届出番号: 13B2X00242000015

機械器具(60) 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用高速レーズ(70740000)

マイクロクリーン

【禁忌・禁止】

- ・本使用目的以外には使用しないこと。
- ・歯科従事者以外は本品を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状・寸法

1) マイクロクリーン本体



W185×D175×H195mm 7kg

2) 電気的定格

電圧/周波数: AC100V 50/60Hz
最大消費電力: 200W
保護の形式: クラス I 機器

**【使用目的又は効果】

本品は、電動機を用いて高速回転で補綴物等の研磨やクリーニングに用いる装置である。

【品目仕様等】

○マイクロクリーン本体

- 1) 回転数 1450rpm

**【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) マイクロクリーン本体の電源コードを 100W の商用電源に接続する。

2. 使用中の操作

- 1) ジャーにクリーニング液、ピンを入れる。
2) ジャーに研磨する補綴物を入れ蓋をし、マウント台に固定する。
3) タイマーを回して研磨する時間を設定し、研磨を開始する。

3. 使用後の処理

- 1) マウント台からジャーを外し、補綴物を取り出す。
2) 清掃を行う。

【使用上の注意】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などの影響を受けない場所に保管すること。
3. 保管中に衝撃、振動を与えないこと。
4. 化学薬品の付近、ガスの発生する場所にほかんしないこと。

【包装】

包装単位: 1台

** *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元 株式会社エーティーディー・ジャパン
TEL 03-5319-1581
FAX 03-5319-1582
2. 製造元 Schütz Dental GmbH (国名: ドイツ)

取扱説明書をご参照ください。