

機械器具(69) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 (35761000)

コンパクトUV光重合器

【禁忌・禁止】

- ・本使用目的以外には使用しないこと。
- ・歯科従事者以外は本品を使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

形状・寸法

1) コンパクト UV 光重合器本体



W265×D88×H115mm 430g

2) 電氣的定格

電圧/周波数：AC100～110V 50/60Hz
最大消費電力：9W
保護の形式：クラス I 機器

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工室で高分子材料を重合するために用いる装置。
紫外線により重合を行う。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) コンパクト UV 光重合器の電源コードをコンセントに差し込む。

2. 使用中の操作

- 1) 模型にのせた高分子材料をコンパクト UV 光重合器の中に入れる。
- 2) コンパクト UV 光重合器の電源スイッチを ON にする。
- 3) 状況を見ながら、裏表各 1 分ずつ重合する。
* 重合時間は、高分子材料により異なり、高分子材料の重合時間を参考にする。

3. 使用後の処理

- 1) コンパクト UV 光重合器本体の電源スイッチを OFF にする。

【使用上の注意】

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などの影響を受けない場所に保管すること。
3. 保管中に衝撃、振動を与えないこと。
4. 化学薬品の付近、ガスの発生する場所にほかんしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元 株式会社エーティーディー・ジャパン
TEL 03-5319-1581
FAX 03-5319-1582
2. 製造元 Willmann & Pein GmbH (国名：ドイツ)

取扱説明書をご参照ください。