

添付文書

2017年10月23日（第3版 新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：13B2X00242000019

2015年12月1日（第2版）

機械器具(70) 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 (35762000)

DuoTron Pro

【禁忌・禁止】

- ・本使用目的以外には使用しないこと。
- ・歯科従事者以外は本品を使用しないこと。

使用上の注意

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などの影響を受けない場所に保管すること。
3. 保管中に衝撃、振動を与えないこと。
4. 化学薬品の付近、ガスの発生する場所にほかんしないこと。

形状、構造及び原理】

形状・寸法

- 1) DuoTron Pro 本体



W305×D464×H717.5mm 40kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売元 株式会社エーティーディー・ジャパン
TEL 03-5319-1581
FAX 03-5319-1582
2. 製造元 B&D Dental Corporation (国名：アメリカ)

- 2) 電氣的定格

電圧/周波数：AC200V 50/60Hz
最大消費電力：2000W
保護の形式：クラス I 機器

【使用目的又は効果】

ポーセレンを焼成するために歯科技工で使われる炉。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- 1) DuoTron Pro 本体の電源コードを 200W の商用電源に接続する。
- 2) DuoTron Pro 本体の電源スイッチを ON にする。

2. 使用中の操作

- 1) DuoTron Pro 本体のタッチスクリーンパネルの焼成モードを設定・選択する。
- 2) 焼成台のシンタリングトレイに焼成物をセットする。
- 3) 焼成台リフトキーを押し、焼成台を上げる。
- 4) スタートキーを押し、焼成を開始する。
- 5) 焼成プログラムが終わると自動で焼成台が下がる。

3. 使用後の処理

- 1) DuoTron Pro 本体の電源スイッチを OFF にする。

取扱説明書をご参照ください。