

機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN34713000
コアアイテック ワンプラス(乾式・湿式)

【警告】

- ① 取扱説明書の操作手順は必ずお守りいただき、必ず操作手順に従ってご使用ください。
- ② 本機の定格(電圧、周波数)に適合する電源コンセントに接続してください。
- ③ 必ず集塵機を動作させてください。
- ④ 燃えやすいもの近く、ガスの充満する場所に設置しないでください。
- ⑤ 緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにしてください。

【禁忌・禁止】

- ① 切削くずは引火しやすいので作業場には火気を持たないでください。
- ② 分解、修理、改造はしないでください。事故につながる恐れがあります。
- ③ 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないでください。

【形状、構造及び原理等】

1 形状、構造外観

① 製品外観



②電気定格

AC 100V-230V 50/60Hz 消費電力 400W

③ 質量・外形寸法

1) 75kg

2) 422 x 644 x 556mm (W x H x D)

2 動作原理

マシニングスピンドルに回転運動を与え各軸方向のコンピュータ数値制御により、材料と軸状ツールを接触させ、切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

CAD/CAM技術により、歯科技工士及び歯科医師が行う歯科用補綴物の作成を支援する。

【性能及び安全性に関する規格】

項 目	仕 様
軸 数	5
加工方式	乾式・湿式

【使用方法等】

- 1 電源を入れる。
- 2 加工するデータを読み込む。
- 3 加工物を装着して固定する。
- 4 使用する工具を所定位置に設置する。
- 5 加工開始する。
- 6 加工完了後、加工物を取り外す。

【使用上の注意】

詳細については、取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

- 1 目的用途以外は使用しないこと。
- 2 作動時回転工具に触れないこと。
- 3 作動時はドアを閉めること。
- 4 使用時アースを接続すること。
- 5 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
- 6 精密機器のため、取扱には十分注意すること。
- 7 異常発生又は故障したときは、すぐに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
- 2 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
- 3 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
- 4 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ 住所 : 茨城県稲敷郡阿見町吉原鎌田3262-3
製造業者 imes-icore GmbH 国名:ドイツ
販売業者 株式会社ヨシダサポートセンター
お問い合わせ先 株式会社エム・ディ・インスツルメンツ TEL : 029-889-1411 FAX : 029-889-1422