


機械器具 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット JMDN コード 34713000
エースリーディー A3D（MD）

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

寸法	1400(H) x 510(W) x 550(D) mm
重量	約 101kg

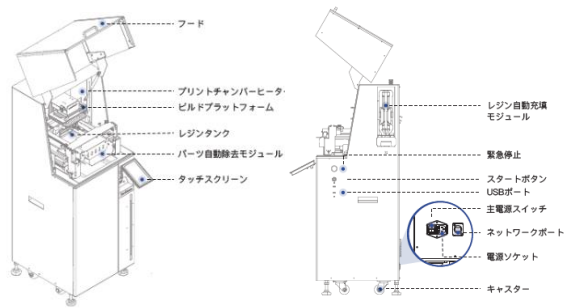

2. 原理 液体状の光硬化性樹脂を光によって一層ずつ硬化させて積層し、造形物を作製する。

3. 性能

造形サイズ	159×144×110 mm
解像度	2160×1920 P
最小径ピッチ	75 μm
ビルド精度	± 37.5 μm
光源波長	385 nm
電圧	100～220 V A C 50/60Hz 500W

【使用方法等】

詳細な設置方法や操作方法については、取扱説明書を参照してください。

- 1) 造形物のプリントファイルを本体に読み込む。
- 2) インクトレイにインクを注入しプリントを開始する。
- 3) プリントが完了したら、造形物を取り出す。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

取扱説明書に従い、適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

1. 取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行する。
2. 保守作業を行う場合、又はクリーニング作業を行う場合は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜いて行う。
3. 本体内部に水分や液体等が侵入すると故障や漏電の原因となるので注意する。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者：株式会社エム・ディ・インスツルメンツ
住 所：〒300-1155

茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田 3262-3

電話番号： 029-889-1411

FAX 番号： 029-889-1422

製造業者： GUANGZHOU HEYGEARS IMC. INC
(ヘイギアーズ社；中国)

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）又は コンピュータ支援製造（CAM）に用いる。

取扱説明書等を必ずご参照ください