

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器 一般医療機器
歯科技工用重合装置 JMDN コード 35761000
P C U 光重合機 (MD)

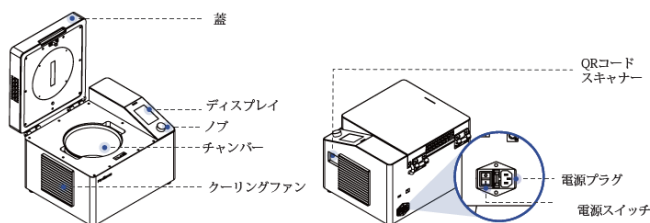
【警告】

<使用方法>

- ・本体内部に直接手を触れたり、分解しないこと。

[高圧電流による感電の恐れ]

- ・ランプ交換用扉を開ける前には、機器の電源コードをプラグから抜くこと。[感電の恐れ]

【形状・構造及び原理等】1. 形状・構造
外観

2. 機器寸法等

AC100-240 V 50/60Hz
410×340×260 mm
重量：16.72 kg

3. 原理

本品は、光を発生させ光触媒型レジン重合硬化させる。

4. 性能

メインスペクトル：380-386 nm

【使用目的又は効果】 本品は光を発生させ、本装置内部で光触媒型レジン重合硬化させる歯科技工用重合装置である。

【使用方法等】

1. 取付・設置

- 1) 機器の取り付けおよび設置は、専門担当者（当社者又は当社 指定の業者）が行うこと。
- 2) 背面パネルは壁面から 10cm 以上離し、冷却ファンの通気性を確保すること。
- 3) 装置底面からの排気を妨げないように、通気性を保って設置すること。

2. 使用方法

補綴物、3D造形物をピーカーに入れ、溶媒に浸して、チャンパー中央部に入れ、光重合を行う。

機器の詳細は操作方法については、付属の取扱説明書をご使用前に必ず読み、その方法に従って操作をしてください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 連続商社の際、本体が高温になるためやけどに注意する。
- 2) ランプが熱い状態でランプを交換しないこと。メインスイッチを ON にしたまま 30 分程度放熱し、熱が冷めてから行う。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

取扱説明書に従い、適切に保管・管理する。

【保守・点検に係る事項】

取扱説明書に従い、日常の保守・点検を励行する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社エム・ディ・インスツルメンツ

住所：〒300-1155

茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字鎌田 3262-3

電話番号：029-889-1411

FAX 番号：029-889-1422

製造業者：GUANGZHOU HEYGEARS IMC, INC
(ヘイギアーズ社；中国)

取扱説明書等を必ずご参照ください