


泌尿器科用キュレット＊＊

【禁忌・禁止】

本品は、高周波仕様ではないため、決して通電させて使用しないこと。[感電や火傷の危険がある]

【形状・構造及び原理等】

・代表的な形状を以下に示す。

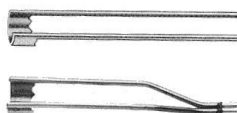

原材料:ステンレス鋼＊

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分


【使用目的又は効果】＊＊

本品は、内視鏡治療時に専用の内視鏡とともに使用する再使用可能な器具で、組織又は異物の回収に用いる。

【使用方法等】

- 使用前に所定の方法で滅菌を行う。
- ワーキングエレメントに付属しているスタビライザーの前部から本品を通していき、絶縁ハウス内へ差し込む。
※本品が奥までしっかり挿入され、リリースボタンを押さない限り抜けないことを確認すること。

・ワーキングエレメント図例

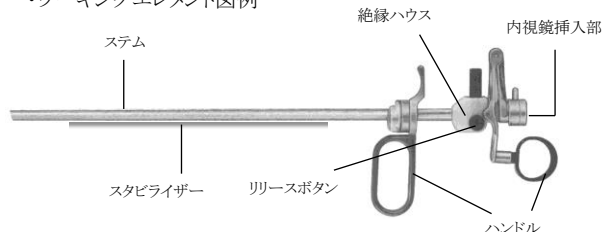

- 内視鏡を内視鏡挿入部から挿入し、固定する。
※内視鏡の有効長、外径を考慮し、適切な仕様のものを選択すること。
- 外管に挿入する。
- ワーキングエレメントのハンドルを握ると、先端部が前後に繰り出し、組織片の回収を行う。

＜使用方法等に関連した使用上の注意＞ ＊＊

- 滅菌は常に同一の方法で行うことを推奨する。[異なる滅菌方法を実施すると、構造材に負担をかけ本品の劣化・損傷を招き、故障につながる可能性が高い]
- 硬い組織等に対しては、無理な力を加えて使用しないこと。[先端部が破損することがある]

【保管方法及び有効期間等】

- よく洗浄後、必ず乾燥させてから保管すること。
- 水のかからない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】＊＊

- しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
- 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。(特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。)
- 器具は使用後速やかに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。[付着物は修復不能な損傷の原因になる]
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 洗浄方法
 - 自動洗浄器
 - 内視鏡のプログラムが設定されている自動器具洗浄器を使用し、管腔を有する器具は専用洗浄チューブを接続して使用すること。
 - 本品に適切なラックを使用し、他の器具と重なり合わないように入れること。[他の器具と重なり合うことにより損傷の原因となり、また、重なっている部分で洗浄効果が減衰する]
 - 洗浄剤や水質によっても製品にダメージを与える場合があり、器具に変質等が生じた場合、直ちに自動洗浄器の使用を中止し、洗浄剤、水質の確認を行うこと。
 - 超音波洗浄器
 - プラスチック等軟性部品には使用しないこと。[超音波振動を吸収するためには効果が無いのみならず、材質の劣化を促進する可能性がある]
 - マニュアル洗浄
 - 洗浄剤及び化学消毒剤を使ってブラッシング及び浸漬等により手洗い洗浄を行う。
 - 感染のリスクを防止するため、手洗い洗浄時には手袋・防水エプロン・ゴーグル等を必ず使用すること。
 - 洗浄、浸漬用にフタ付きで水きり用の内かごが付いている容器を準備すること。
 - 洗浄手順
 - 専用容器に準備した洗浄溶液に器具を浸漬する。水温は 35～40℃ 前後(暖かいと感じる温度)が適温である。薬剤による器具の損傷の可能性がある為、溶液には 60 分以上浸漬したままにしないこと。
 - スポンジで全ての外表面を注意深く清掃する。
 - 管腔内は適切なブラシやクリーニングピストルを用いて洗浄する。
 - 純水で時間をかけて十分な濯ぎを行う。
 - 埃の出ないやわらかい布や圧縮空気で乾燥させる。
- 洗浄後の器具の点検とお手入れ
 - 外観の目視(特に体内に入る部分は入念に)確認、可動部の機能確認を行うこと。(異常が見られたら使用を中止し、交換すること。)
 - プラスチック又はシリコン部品の変色・変質・柔軟性(硬化の有無)・孔の有無を確認し、異常が認められた場合は直ちに部品を交換すること。
- 洗浄剤
 - 材質にアルミニウム、真鍮を使用している製品にはアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤は使用しないこと。[材質に損傷を与える可能性が高い]
 - その他の製品をアルカリ性、酸性洗浄剤又は化学消毒剤で洗浄する場合には、洗浄剤又は消毒剤の残留物が残らないように純水にて十分に濯ぎを行うこと。
 - 内視鏡および内視鏡関連器具に適した洗浄剤又は消毒剤を使用すること。

8. 使用前に必ず下記の方法で滅菌を行うこと。

注:滅菌前に器具を洗浄し、良く乾燥してから滅菌を行うこと。

(1) エチレンオキシドガス滅菌方法

本品を滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

＜滅菌条件①＞

- ・ガス混合物 : エチレンオキシドガス 100%
- ・ガス濃度 : 725±30 mg/L
- ・温度 : 55 ℃
- ・湿度 : ≥70 %RH
- ・圧力 : 0.09 MPa
- ・時間 : 1～2 時間(滅菌機材による)

＜ガス抜き方法＞

51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。
(推奨 55℃で 12 時間)

又は

＜滅菌条件②＞

- ・ガス混合物 : エチレンオキシドガス 100%
- ・ガス濃度 : 600～700 mg/L
- ・温度 : 40～60 ℃
- ・湿度 : 50～60 %RH
- ・圧力 : 0.1 MPa
- ・時間 : 3～6 時間

＜ガス抜き方法＞

51～59℃で 12 時間のエアレーションを行う。
(推奨 55℃で 12 時間)

(2) オートクレーブ滅菌方法

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、オートクレーブ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 134～137 ℃
- ・時間 : 4～18 分間

※真空式高圧蒸気滅菌 (pre-high vacuum) 方式のオートクレーブを推奨する。

※オートクレーブ滅菌を行う際に金属容器を使用している場合は、本品と金属部を直接触れないよう注意すること。

(3) プラズマ滅菌 (ジョンソン・エント・ジョンソン社/販売名「ステラット」 100S、NX 又は 100NX)

本品を専用滅菌ケース又はトレーに収納し、滅菌包材で包んだ上、プラズマ滅菌を行う。

＜滅菌条件＞

- ・温度 : 約 45～55℃ (機種による)
- ・湿度 : 約 10%RH
- ・時間 : 28～105 分 (機種による)

(4) 薬液消毒方法

容器を 2 個用意し、一方には薬液を他方には滅菌水を入れる。
薬液に 30 分浸した後、本品を滅菌水に移し、約 5 分間浸す。

＜消毒条件＞

- ・使用薬液 : 2%グルタルアルデヒド

※薬液消毒の場合、必ず、薬剤製造業者の指示に従うこと。

また、本品を 60 分以上液体に浸漬させたままにしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 *



エムシーメディカル株式会社

製造販売業者: エム・シー・メディカル株式会社

電話:03-5715-2800 (代表)

製造業者: カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)

国名:ドイツ