

スマートスコープ

【形状・構造及び原理等】

<全体図>

(1) スマートフォンホルダー



(2) スマートスコープ



セット品番	スマートフォンホルダー	スマートスコープ
20288001-I6	20288100-I6	20288991
20288001-I7	20288100-I7	

番号	名称	機能及び動作
①	スマートスコープ接続部	スマートスコープを接続する。
②	調整ネジ	調整ネジを緩めることで接続したテレスコープとスマートフォンを回転させることができる。
③	スタンドアダプター	スタンドを接続する。
④	テレスコープマウント	テレスコープを接続する。

【使用目的は効果】

本品は、テレスコープをスマートフォンに連結させる内視鏡アクセサリであり、体内の静止画や動画を撮影するために使用する。

【使用方法等】

1. スマートフォンをスマートフォンホルダーに取付ける。



2. スマートスコープをスマートスコープ接続部に接続する。



3. テレスコープマウントにテレスコープを接続する。



4. スマートフォンの電源を入れ、モニターに画像が表示されていることを確認してから、目的の治療及び観察を行う。

<スタンド使用方法>

本品のスタンドアダプターに市販のカメラ用スタンドを固定する。

なお、調整ネジを緩めることで、接続したテレスコープとスマートフォンを回転させることができる。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品は洗浄することができないため、血液や体液、分泌物等に触れた場合、本品を速やかに廃棄する。

【保管方法及び有効期間等】

本品の保管場所は次の点に注意すること。

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。異常が見られたら使用を中止し、交換すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。
2. 本品が破損するおそれがあるため、本品は浸漬消毒や滅菌を行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



エムシーメディカル株式会社

製造販売業者：エム・シー・メディカル株式会社

電話:03-5715-2800（代表）

製造業者：カールストルツ社（KARL STORZ SE & Co. KG）

国名:ドイツ