

類別：機械器具(39)医療用鉗子
一般医療機器
一般的名称：鉗子（JMDNコード：10861001）


販売名：永田式妊娠子宮腔部鉗子

【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないで下さい。[誤った使用法は本製品の破損を招く恐れがあるため。]
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないで下さい。[振動・切削・打刻等により著しく劣化・消耗させ、故障・破損の原因となるため。]
3. 本製品の使用にあたり、この添付文書を事前に十分に理解して下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 原材料／材質：ステンレス鋼
2. 形状／構造：以下の通り

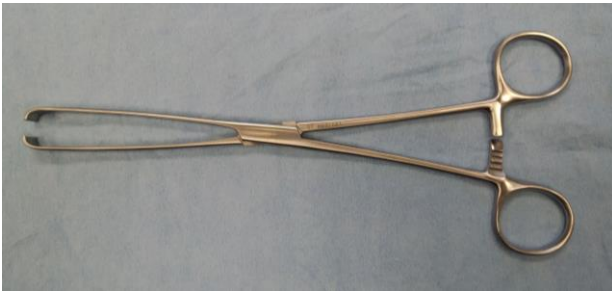

3. 動作原理

本製品のハンドル部を操作することによって先端部が開閉し、目的部位を把持、圧迫、圧搾します。

【使用目的】

婦人科的診察及び手術の医療行為の際、臓器、組織、異物等を把持、圧迫、圧搾等するために用います。本品は再使用可能です。

【品目構成】

永田式妊娠子宮腔部鉗子 23cm Box

【使用上の注意】

1. 本品は未滅菌なので、使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）して下さい。
2. 使用前に正常に作動していることを確認して下さい。
3. 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないで下さい。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないで下さい。
4. 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬して下さい。
5. 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避けて下さい。使用中に付着したときには水洗いして下さい。
6. 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷する危険性があり、また、器械の表面が損傷するので、併用しないで下さい。
7. 手術用器具は使用目的に合わせて繊細かつ精巧に作られています。変形或いはキズをつける等の粗雑な取り扱いが器具の寿

命を著しく低下させます。

【貯蔵・保管方法】

1. 本製品は高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管して下さい。また水漏れや直射日光は避けるように細心の注意を払って下さい。
2. 本製品は貯蔵・保管の際、変形や破損の原因となりうる硬い物への接触や衝撃を避けるよう注意を払って下さい。
3. 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に関らず必ず乾燥をして下さい。
4. 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐために、清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をして下さい。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒して下さい。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用して下さい。
3. 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄するときには、物同士が接触して損傷することがないように注意して下さい。
4. 洗剤の残留がないように十分にすすぎをして下さい。仕上げすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いて下さい。
5. 洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥して下さい。
6. 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり等の異常がないか点検をして下さい。
7. 点検後、セット・包装をし、滅菌して下さい。
8. 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあるので、使用を避けて下さい。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時に使用しないで下さい。
9. 洗浄・消毒後、鉗子類が常温（洗浄・消毒の熱が取れてから）になってから、組み立て、開閉を行なって下さい。

【包装】

- 1 本入り／袋

【製造販売業者の氏名または名称及び住所等】

◆製造販売業者

株式会社エスティーメディカル
〒113-0033 東京都文京区本郷3-13-11 恩田ビル
TEL:03-3813-1255 FAX:03-3813-1351
<http://www.st-medical.co.jp/>