

再使用禁止

## Easytrap サクション ポリープ・トラップ システム


## &lt;禁忌・禁止&gt;

- ・再使用禁止
- ・使用方法における禁忌、禁止
- ・この処置具は記載の目的以外には使用できません。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1.形状

【カタログ番号：MED-105】

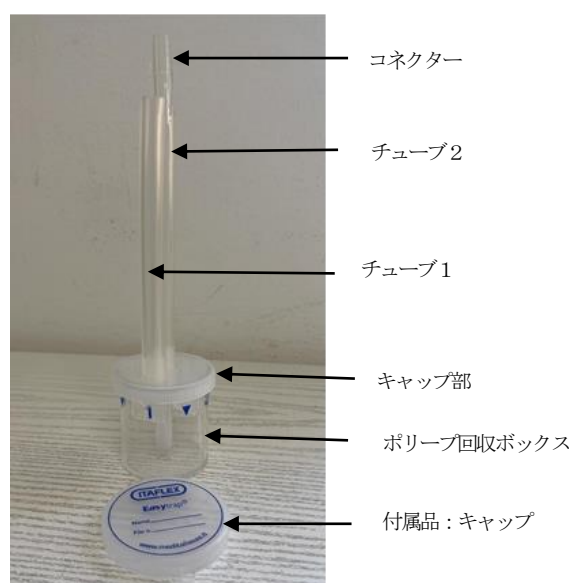

## 2.寸法

ポリープ回収ボックス：高さ 52mm、  
外径 53.2mm(蓋側) / 48.65mm(底部)  
チューブ長：160mm  
(誤差±10%)

## 3.原理

2本のチューブを内視鏡と吸引器に接続し、切除したポリープが吸引により回収ボックスに回収、採取できる。回収ボックスは4つ（1～4）に分かれており、回収を終了すると、キャップ部を取り外し、付属品のキャップに患者名等の情報を記載し、患者名が正しいことを確認して蓋をする。

## 【使用目的又は効果】

- ・本品は、内視鏡手術的に処置し切除されたポリープの回収の為に、吸引器とともに使用される器具である。本品は単回使用である。

## 【使用方法等】

1. ポリープ回収ボックス上にあるチューブ2のコネクタを吸引器に接続する。
2. もう一方のチューブ1を内視鏡に接続する。
3. 通常の吸引は、キャップ部の▽をポリープ回収ボックスの▼に合わせる。
4. 1回目のポリープ回収時には、キャップ部を回転させてキャップ部の▽をポリープ回収ボックスの数字「1」に合わせて吸引する。
5. 1回目のポリープの回収が終わると、キャップ部の▽をポリープ回収ボックスの▼に合わせて通常の吸引を行う。
6. さらにポリープを回収するには、キャップ部の▽を回して、ポリープ回収ボックスの「2」「3」「4」に合わせて吸引を行う。
7. チューブ2のコネクタを吸引器から、チューブ1を内視鏡から取り外し、その後、キャップ部をポリープ回収ボックスから取り外す。
8. 医療機関のガイドラインに沿って、ポリープ回収ボックスを適切な固定剤に浸す。
9. 付属品のキャップに患者名、番号等を記載し、ポリープ回収ボックスに確実に閉めて搬送の準備をする。
10. 使用後は適切な方法で廃棄する。

## 【使用上の注意】

- ・本品のポリープ回収ボックスが4つ(1～4)に分かれている。回収が終了したら、キャップ部を取り外し、付属品のキャップに患者名等の情報を記載し、患者名が正しいことを確認してから付属品のキャップで蓋をしてください。

## 【保管方法】

- ・使用後は破棄して下さい。
- ・直射日光を避けて保管して下さい。
- ・本品の上に物を置いたり、危険物と一緒に保管しないで下さい。

## 【製造販売業者及び製造業者の】氏名又は名称

販売元：株式会社アピス

連絡先：TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

製造販売元：(株)エムディアイジャパン

連絡先：TEL：06-6358-8022

製造業者：メディタリア社（イタリア）

Meditalia s.a.s.