

ポリキャッチ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

◎全体図

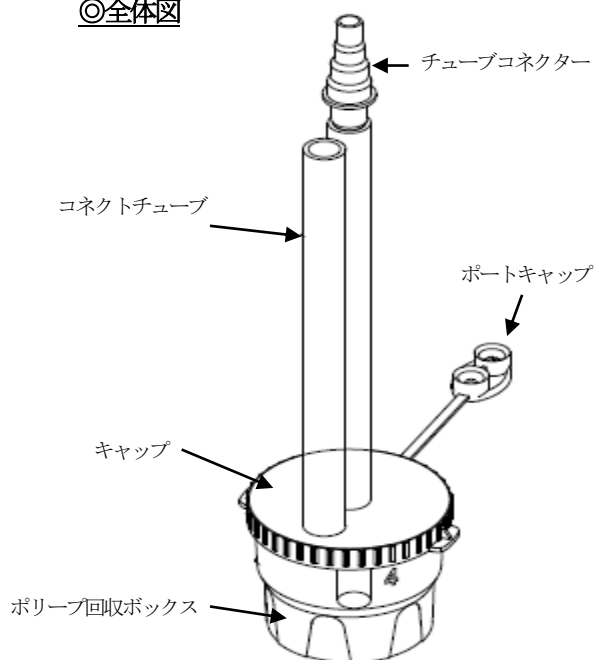

◎キャップ図

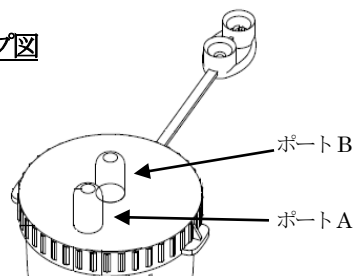

・寸法

ポリープ回収ボックス：縦：46.5mm、横：42.2mm

キャップ直径：55.5mm

コネクチューブ長さ：154mm

チューブコネクタ長さ：47.5mm

動作原理

内視鏡の吸引口金と吸引システムの間接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織をボックスに採取、一時保管できる。

【使用目的又は効果】

・本品は組織の回収のために吸引器とともに使用される器具である。

【使用方法等】

使用方法：

1. ポートAに接続したコネクチューブを内視鏡に接続し、ポートBに接続したコネクチューブを吸引システムに接続する。
2. キャップ部に記載されている矢印がチャンパの番号を指すように回転させ吸引を始める。追加の組織を回収する際は再度キャップ部を次のチャンパの番号を指すように回転させ吸引し次の組織の回収を行う。組織の回収が完了したらキャップ部に記載されている矢印を番号が書かれていないチャンパに回転させポリープ回収ボックス内の廃液を排出する。
3. 医療機関のガイドラインに従った適切な溶液（例えばホルムアルデヒド）でポリープ回収ボックス内を満たし、ポートキャップでポートAとポートBを密閉する。
4. 検体検査の為、適宜チャンパに表示されている番号と検体を照らし合わせ記録する。

【使用上の注意】

・本製品の包装に破れがあった場合使用しない。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

・湿度の高い場所で保存しない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：(株)エムディアイジャパン

連絡先：06-6358-8022

外国製造業者：Zhejiang Chuangxiang Medical Technology Co., Ltd.

国名：中国

販売元（問合せ先）：四国電機株式会社

連絡先：088-678-3022