

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 吸引器用キャニスタ 34858000

再使用禁止


## ABIS ディスポーザブルポリープトラップ

## &lt;禁忌・禁止&gt;

- ・再使用禁止
- ・使用方法における禁忌、禁止
- ・この処置具は記載の目的以外には使用できません。

## 【形状・構造及び原理等】

## 1. 形状

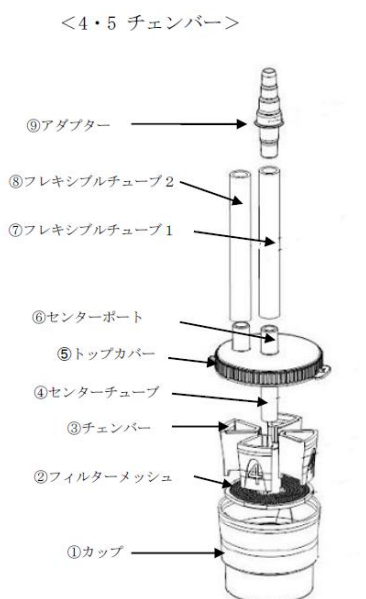

- ①カップ 外径：52.5mm (±0.15mm)  
⑦⑧チューブ長：150mm (±5mm)

## 2. 製品仕様

モデル	仕様
4 チェンバー	フレキシブルチューブ 2 本 (アダプター有り)
5 チェンバー	フレキシブルチューブ 2 本 (アダプター有り)

## 3. 原材料

ポリスチレン、低密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート、

## 4. 原理

チューブを内視鏡と吸引器に接続し、切除したポリープが吸引によりカップに回収、採取できる。チェンバーごとに検体が採取できる。

## 【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡手術的に処置し切除されたポリープの回収の為に、吸引器とともに使用される器具である。本品は単回使用である。

## 【使用方法等】

- 1) センターポートにつながるフレキシブルチューブ 1 と吸引器をつなぐ。
- 2) アダプターが付いていないフレキシブルチューブ 2 を内視鏡に接続する。
- 3) カップを回してトップカバーの矢印をチェンバー外スペースに合わせ通常吸引する。
- 4) 最初のポリープを回収する為に、トップカバーの矢印部分がチェンバー 1 に合うようにカップを回す。
- 5) 1 回目のポリープ回収後、必要とあれば、3. の手順で通常吸引を行う。
- 6) 別のポリープを回収するごとにチェンバー 2, 3, 4 と、4) の手順を繰り返す。(ただし同一患者に限る。)
- 7) フレキシブルチューブ 1 を吸引器から、フレキシブルチューブ 2 を内視鏡から外し、センターチューブもトップカバーから外す。
- 8) センターポートから、またはトップカバーを外して固定液を注ぎカップに満たす。固定液を入れ終わったらトップカバーで蓋をする。
- 9) フレキシブルチューブ 2 を曲げてセンターポートに被せて蓋をし、運搬できるようにする。
- 10) 使用後は、本品は人体・環境汚染を及ぼす危険性があるので、地方自治体に従った適切な方法で廃棄する。

## 【使用上の注意】

- ・本品使用時は常に手袋と防護服を着用すること。
- ・使用前に欠けやひび割れがないか確認し、異常があれば使用を中止する。

## 【保管方法】

- ・使用後は破棄して下さい。
- ・直射日光を避けて保管して下さい。
- ・本品の上に物を置いたり、危険物と一緒に保管しないで下さい。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

販売業者：株式会社アビス

兵庫県揖保郡太子町佐用岡 471-1

連絡先：TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

製造販売業者：株式会社エムディアイジャパン

連絡先：TEL：06-6358-8022

製造業者：Yangzhou Fartley Medical Instrument Technology Co., Ltd.  
(中国)