


歯科材料09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
エイリン ロビンソンブラシ

【形状、構造及び原理等】

1) 成分

- ①軸部: ステンレス鋼
- ②作業部: 豚毛

2) 構造

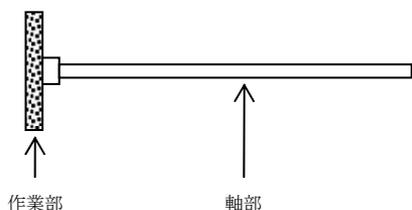

- ①軸部の規格: JIS T 5504-1、
軸部形式2 (Φ2.35mmHP用)
軸部の長さ: スタンダード
- ②作業部: 豚毛の硬さおよび直径

名称及び種類		直径(mm)	硬さ
ミニ	ソフト	10.6	軟毛
	ミディアム	10.6	標準毛
No.9	ソフト	14.2	軟毛
	ミディアム	14.2	標準毛
No.11	ソフト	17.4	軟毛
	ミディアム	17.4	標準毛

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、歯科用研磨剤を塗りながらソフトタッチで継続的に被研削物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に装着し、半チャックでないことを確認すること。
2. 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
3. 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。
4. 過度の回転数を超えて使用しないこと。
5. 損傷、変形(錆、表面傷、曲がり、汚染)等のあるものは、使用しないこと。
6. 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
7. 公的機関が許可した防塵マスクを使用し粉塵を吸入しないこと。
8. 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
9. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

* 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等

製造販売業者 有限会社 英倫商会
住 所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号
電 話 06-6710-5253
製造業者 SHANGHAI RABBIT DENTAL INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD.
シャanghaiラビットデンタルマテリアルインダストリアルカンパニーリミテッド
中国