


歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

ユニバーサルポリッシャー

【形状、構造及び原理等】

形 状：

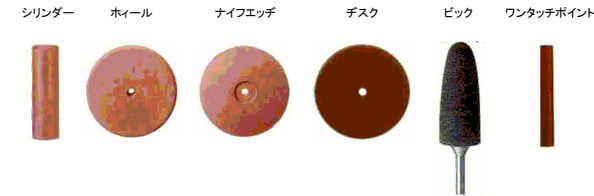

型番	名 称	径φmm
0524	シリンダー	21/7
0501	ホイール	22/3
0510	ナイフエッジ	22/3
0315	ボーセレンシリンダー	22/6
0301	ボーセレンホイール	22/3
0310	ボーセレンナイフエッジ	22/3
1323	コバルトシリンダー	22/6
1301	コバルトホイール	22/3
1423	ニッケルシリンダー	22/6
1401	ニッケルホイール	22/3
0222	クロムボルシリンダー	22/6
0203	クロムボルホイール	22/3
0023	ブラウンシリンダー	22/6
0001	ブラウンホイール	22/3
0664	ビック ブラウン	25/10
0674	ビック グリーン	25/10
1101	ワンタッチポイント ブラウン	22/3
1102	ワンタッチポイント レッド	22/3
1103	ワンタッチポイント グリーン	22/3
1405	グリーンディスク	22/1
1701	チタンホイール	22/3
1704	チタンシリンダー	23/6
0202	クロムボル ホイール M	22/3
0203	クロムボル ホイール C	22/3
0654	ビック イエロー	25/10

ビック軸部：JIS T 5504-1・形式2（Φ2.35mmHP用）/スタンダード

原材料：シリコンゴム、炭化ケイ素
 原 理：歯科用ゴム製研磨材

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、回転させて、継続的に被研削物に押し付けて研磨する。

【使用上の注意】

[使用注意]

1. ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に装着し、半チャックでないことを確認すること。
2. 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
3. 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用を避けること。
4. 過度の回転数（シリンダー・ディスク：20,000回転、ホイール・ナイフエッジ：10,000回転、ビック：7,000回転）を超えて使用しないこと。
5. 損傷、変形（錆、表面傷、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
6. 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
7. 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
8. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 有限会社 英倫商会
 住 所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号
 電 話 06-6710-5253
 製 造 業 者 Edenta Etablissement
 エデンタ エタブリッセメント
 リヒテンシュタイン