

器具器械 4 9 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000  
ユニバーサルマンドレル

【形状、構造及び原理等】

シリンダー用



4004

4016


4017

ワンタッチ用



1107

ホイール・ディスク用

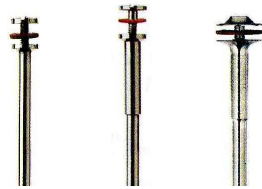

4001

4007

4029

ペーパーコーン用



4013

該当規格：JIS T 5204「歯科用マンドレル」

軸部寸法：JIS T 5504-1

形式 2（Φ2.35mmHP 用）/スタンダード

ねじ頭部の直径

型番	直径（Φmm）
4004	4.0
1107	6.0

【使用目的又は効果】

研削砥石、研磨ディスク、丸の子、ドリルビット、旋盤の主軸台等の回転式歯科用切断器具や、研削・研磨に用いるディスク、石カップ等を保持するシャフト

【使用方法等】

歯科用駆動装置及びハンドピース又は歯科技工用回転機器に装着し、継続的に研削研磨材を回転させ保持する。

【使用上の注意】

1. ハンドピースメーカーの指定に従って確実に装着し、半チャックでないことを確認すること。
2. 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
3. 損傷、錆等のあるものは、使用しないこと。
4. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

外圧（物理的負荷）及び汚染（もらい錆など）を防ぐように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社 英倫商会

住 所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号

電 話 06-6710-5253

製造業者 Edenta Etablissement  
エデンタ エタブリッセメント  
リヒテンシュタイン