


歯09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000  
カッティングディスク・カッティングホイール

\*\*【形状、構造及び原理等】

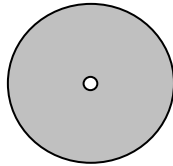

種別	型番	直径(Φmm)	厚さ(mm)
ディスク	#01	22	0.25
	#00	25	0.25
	#0	25	0.35
	#1	25	0.50
	#2	38	0.60
	EX1	25	0.60
	EX2	38	0.70
ホイール	#3	32	2.00
	#4	25	3.00

【使用目的又は効果】

炭化ケイ素、アルミナ等を用いる技工用研削材

【使用方法等】

歯科用マンドレルに取り付け、歯科用電気エンジン、高速レーズなどに装着して使用する。

【使用上の注意】

【使用注意】

1. 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
2. ハンドピースメーカーの指定に従って確実に装着し、半チャックでないことを確認すること。
3. 予め回転させて、振れがないことを確認すること。
4. 過度の回転数（20,000回転）を超えて使用しないこと。
5. 損傷、錆等のあるものは、使用しないこと。
6. 無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
7. 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
8. 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社 英倫商会

住所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号

電話 06-6710-5253

製造業者 SHANGHAI RABBIT DENTAL INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD.

シャanghai ラビット デンタル マテリアル インダストリアル カンパニーリミテッド

中国