

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
エレファントルーシュ D-24

*【形状、構造及び原理等】

〔形状及び構造〕

台形（質量：500g）

〔原理〕

研削研磨機械に装着したブラシ又はバフに本品を塗布し、回転させ、補綴物等に接触させることで物理的に研磨効果が得られる。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。

【使用方法等】

研削研磨機械に装着したブラシ又はバフに本品を塗布し、回転させ、補綴物等に接触させ研磨する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

1. 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
2. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
3. 研磨作業の際に、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
4. 万一目に入った場合は、こすらずに直ちに水で十分洗い流して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 有限会社 英倫商会

住 所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号

電 話 06-6710-5253

製造業者 有限会社 英倫商会