

歯科材料（09） 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ 35768000  
ポリッシングブラシ

【禁忌・禁止】

- ◇ 目的以外の使用禁止、歯科領域以外での使用禁止。
- ◇ 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

《形状・構造》金属製のベース部とナイロン製のブラシ部からなる。  
《原理》 ブラシ部に研磨剤を適用し、歯科用ハンドピースに取り付け回転させて、歯表面や歯間部・咬合面を清掃。研磨する。

《種類》 1. 2112-Screw Type 外径 4.5mm



2. 2114-CA Flat Type 外径 4.5mm

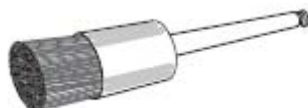

3. 2115-CA Sharply Type 外径 4.5mm



《材質》 ベース部：黄銅にクロムめっき  
ブラシ部：ナイロン

【使用目的又は効果】

歯科衛生士及び歯科医師が歯の清掃と研磨に用いる。

【品目仕様等】

| 規格                   | 外径(mm) | 推奨回転数（毎分） |
|----------------------|--------|-----------|
| 2112-Screw type      | 4.5    | <1,500    |
| 2114-CA Flat type    | 4.5    | <1,500    |
| 2115-CA sharply type | 4.5    | <1,500    |

【使用方法等】

1. 研磨部位に応じてブラシを選択する。
2. 歯科用ハンドピースに装着する。
3. ブラシ面に研磨剤を付け、歯面に軽く押し当てて研磨する。

【使用上の注意】

使用注意

- (1) 本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- (2) 本品は記載の目的にのみ使用すること。
- (2) 再使用しないこと。
- (3) ハンドピースに軸部を確実に装着すること。
- (4) 口腔外で予備回転を行い、異常な震動やぶれがないことを確認すること。
- (5) 研磨中は無理な力を加えないこと。過度の研磨や、本品の破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。
- (6) スクリュータイプは、モーターを正回転で使用する。逆回転を行うと軸部が外れる恐れがある。

- (7) 局所の異常な発熱を防ぐため、ブラシ部を常に移動させながら使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保存方法

包装用の箱に入れた状態で、清潔な場所で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前の点検の実施

本品は使用前点検により、破損や変形がないか確認すること。  
異常が認められたときは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

■製造販売業者

株式会社エスイーエム  
お問合せ先：0572-26-8093

■製造（輸入）

レコデント・インターナショナル社  
[Reco-Dent International Co., Ltd.]  
台湾  
[Taiwan]