

歯科材料（09） 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯磨カップ 16184000

## ポリッシングカップ

### 【禁忌・禁止】

- ◇ 目的以外の使用禁止、歯科領域以外での使用禁止。
- ◇ 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

《形状・構造》金属製のベース部とナイロン製のブラシ部からなる。  
《原理》 ブラシ部に研磨剤を適用し、歯科用ハンドピースに取り付け回転させて、歯表面や歯間部・咬合面を清掃。研磨する。

《種類》 1. 2101-Snap on type



2. 2102-Screw Type



3. 2104-CA Type



《材質》 カップ部：ラテックスゴム  
2102の軸部：真ちゅう  
2104の軸部：ステンレス

### 【使用目的又は効果】

歯科予防時又は清掃時に研磨剤を適用するために用いる。本品は歯科用ハンドピースに装着して回転させながら使用する。

### 【品目仕様等】

規格	外径(mm)	推奨回転数(毎分)
2101-Snap on type	6.0	<1,500
2102-Screw type	6.0	<1,500
2104-CA type	6.0	<1,500

※ カップの色は、白、青、緑色、灰色などがある。

### 【使用方法等】

1. ハンドピースのタイプに応じてカップを選択する。
2. 歯科用ハンドピースに装着する。
3. カップに研磨剤を付け、歯面に軽く押し当てて研磨する。

### 【使用上の注意】

#### 使用注意

- (1) 本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
- (2) 本品は記載の目的にのみ使用すること。
- (2) 再使用しないこと。
- (3) ハンドピースに軸部を確実に装着すること。
- (4) 口腔外で予備回転を行い、異常な震動やぶれがないことを確認すること。
- (5) 研磨中は無理な力を加えないこと。過度の研磨や、本品の破損や口腔粘膜を傷つける恐れがある。
- (6) スクリュータイプは、モーターを正回転で使用すること。逆回転を行うと軸部が外れる恐れがある。
- (7) 局所の異常な発熱を防ぐため、カップ部を常に移動させながら使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 貯蔵・保存方法

包装用の箱に入れた状態で、清潔な場所で保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用前の点検の実施

本品は使用前点検により、破損や変形がないか確認すること。異常が認められたときは使用しないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

#### ■ 製造販売業者

株式会社エスイーエム  
お問合せ先：0572-26-8093

#### ■ 製造（輸入）

レコデント・インターナショナル社  
[Reco-Dent International Co., Ltd.]  
台湾  
[Taiwan]