

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000
医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
株式会社エスイーエム
お問合せ先：0572-26-8093

【形状・構造及び原理等】

綿 100% のガーゼ製品です。

《形状》 タイプ I

《規格》

規格	折り上がり寸法
尺角 30cm×30cm 平折	30.0cm×30.0cm (+/-0.3cm)
尺角 30cm×30cm 2 折	15.0cm×30.0cm (+/-0.3cm)
尺角 30cm×30cm 4 折	15.0cm×15.9cm (+/-0.3cm)
尺角 30cm×30cm 8 折	15.0cm×8cm (+/-0.3cm)
徳用 30cm×1000cm	15.0cm×30.0cm (+/-0.3cm)

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造への適用を目的とする主としてガーゼから成る器具。

【使用方法等】

1. 用途に応じて必要な大きさにカットして、適宜滅菌して使用すること。
2. 創傷面には滅菌して使用すること。
3. 滅菌は、高圧蒸気滅菌、E. O. G. 滅菌ができる。

【使用上の注意】

1. 体内に留置しないこと。
2. 包装が開封もしくは破損しているもの、汚れているものは使用しないこと。
3. 製品に破損や汚れが認められるものは使用しないこと。
4. 開封後は早めに使用すること。
5. 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。