

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

AWL 医療用脱脂綿

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿製品。

本品は白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したり等、医療目的に使用するパット状の綿繊維からなる材料をいう。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、適宜滅菌して使用すること。
2. 創傷面には滅菌して使用すること。
3. 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は一回限り、再使用しないこと。
2. 体内に留置しないこと。
3. 本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。
4. 開封後は早めに使用すること。
5. 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
6. 包装が開封もしくは破損しているもの、汚れている物は使用しないこと。
7. 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
8. 綿の表面や内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみつかることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光、火気及び高温多湿を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社エスイーエム

お問合せ先：0572-26-8093