

医 0 4 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

フィルターボール アルファ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・体内に留置しないこと

**【形状・構造及び原理等】

* ■形状

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルメロースナトリウム水溶液（糊剤）を噴霧、適当な長さに裁断し、エチレンオキサイドガス滅菌したものである。

* ■材質

セルロース

* ■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布するため、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に適宜使用する。

**【使用上の注意】

- ・包装が破損、汚損等、異常がみられる場合は、使用しないこと。
- ・滅菌インジケーターの色に異常がある場合は、使用しないこと。
- ・開封後はすぐに使用すること。
- ・使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- ・糊剤の一部が変色する場合があるが、品質、安全性に問題はない。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
- ・有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市中区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226