

**2026 年 7 月(第 4 版)

届出番号 : 23B2X00011000006

* 2023 年 7 月(第 3 版)

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール (11028000)

フィルターボール アルファ (未滅菌)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

 株式会社エプスリー

愛知県名古屋市区笠取町三丁目 415 番地
TEL052-522-5226

**【形状・構造及び原理等】

本品は、脱脂した綿繊維に糊剤としてカルメロース
ナトリウム水溶液を噴霧しながら成型したもので
ある。

**【使用目的又は効果】

血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等

* **【使用方法等】

- ・ 本品は未滅菌品のため、適宜滅菌して使用する。
- ・ 創傷面に使用する場合は、必ず滅菌して使用する。
- ・ 血液吸収時には止血部分を圧迫できる程度に本品
で押さえ、テープや包帯で固定する。
- ・ 滅菌は、エチレンオキシドガス滅菌を行う。

**【使用上の注意】

- ・ 開封後は早めに使用すること。
- ・ 使用中は止血の状態を適宜確認し、圧迫の程度を
調節すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場
所を避けて保管すること。