

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

ドレナーゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ・体内に留置しないこと

* 【使用方法等】

- ・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
・滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

* 【使用上の注意】

- ・包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリード

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

* 【形状・構造及び原理等】

* ■ 形状

綿100%の平織りガーゼ数枚を重ね、綿100%の糸で縫製し、X線造影糸を織り込んだもの。通常は四角形で、その1角に体内残留を防ぐ目的で綿テープを取り付けてある。白い布で、におい及び味はない。X線造影用の糸を1本以上含有している。

* ■ 材質

セルロース

* ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。X線造影糸により、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。