

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌コンファーゼ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸部分以外のガーゼを挟んで使用すること。
- ・体内に留置しないこと。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・滅菌インジケーターの色に異常がある場合は使用しないこと。
- ・使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・滅菌期限内に使用すること。

** 【形状・構造及び原理等】

* * ■ 形状

綿100%のガーゼにX線造影糸を織り込んだ布状製品で、におい及び味はない。当製品は、エチレンオキサイドガス滅菌済みである。

* * ■ 材質

セルロース

* * ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。X線造影糸により、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

* 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。X線で検知できる成分を含む。

* 【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- ・有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリード

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226