

医04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ 13705000

ビーンズ X

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に残存するおそれがあるので、X線造影糸部分以外を挟んで使用すること。
- ・体内に留置しないこと

*【使用方法等】

- *・使用目的に応じ、滅菌して適宜使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

*【使用上の注意】

- *・本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- *・使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

*■形状

綿100%のガーゼにX線造影糸を織り込んだものを折りたたみ、球状製品にしたもの。本品は白色の球状製品で、におい及び味はない。X線造影糸の糸を1本以上含有している。

*■材質

セルロース

*■原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。X線造影糸により、X線透過装置を用いて本品の位置を特定できる。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X線で検知可能な成分を含有する器具をいう。