

医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

滅菌コンファコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

**【形状・構造及び原理等】

**■ 形状

綿100%の脱脂綿。白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

**■ 材質

セルロース

**■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

*【使用上の注意】

- ・ 包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・ 滅菌インジケーターの色に異常がある場合は使用しないこと。
- ・ 使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・ 滅菌期限内に使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。
- ・ 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226