

**平成29年1月作成(第3版)新記載要領に基づく改訂

届出番号 23B2X00011000039

*平成25年1月作成(第2版)

医04 整形用品

一般医療機器 コットンボール (JMDNコード 11028000)

筒綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状・構造及び原理等】

本品は、脱脂した綿繊維を丸めた物に、カルメロー
スナトリウム水溶液を噴霧、適当な長さに裁断した
ものである。

【使用目的、効能又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去
するために用いる綿繊維の球状の塊

【使用方法等】

滅菌して、血液・体液の吸収又は薬剤の塗布等に適
宜使用する。滅菌は、EOG 滅菌、電子線滅菌、ガン
マ線滅菌を行う。

**【使用上の注意】

体内に留置しないこと。

包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使
用しないこと。

使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および
汚染物の飛散防止に十分注意すること。

**【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日
光のあたる場所を避けて、室温で保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町3-4-15

TEL：052-522-5226

発売元

株式会社 竹虎 メディカル事業部

お問い合わせ先 0120-094-315