

## コンファ ケアシステム

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

再使用禁止

〈適用患者〉

本品の材質(別紙原材料の項を参照)にアレルギーを有する患者に使用しないこと。

#### \*\*【形状・構造及び原理等】

一般的な処置(消毒、止血、清拭等)を行うために必要な各種の一般医療機器等を組合せた滅菌済キットである。本医療機器は、以下に示す構成品のうち、二品以上の構成品を組合せて構成する。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

#### \*\* 一般医療機器

一般的名称	材質
コットンボール	セルロース/カルメロースナトリウム水溶液
医療ガーゼ	セルロース
開腹術用スポンジ	セルロース
医療用不織布	セルロース
医療脱脂綿	セルロース
救急絆創膏	ポリエステル/パルプ/アクリル系粘着材
カテーテル被覆・保護材	ポリエステル/パルプ/アクリル系粘着材

#### \*\* 雑品

一般的名称	材質
非天然ゴム製検査・検診用手袋	ポリ塩化ビニル/ニトリルゴム
天然ゴム製検査・検診用手袋	ラテックス
ピンセット	ポリプロピレン
綿棒	セルロース/カルボキシメチルセルロース
シート	セルロース/ポリエチレン/PET, レーヨン
カテーテル枕	セルロース
潤滑ゼリー	精製水 /グリセリン/カルボキシビニルポリマー/安定剤 (NaOH メチルパラベン)
粘着テープ	ポリエステル/パルプ/アクリル系粘着材
バルーン拡張器	ポリプロピレン
チューブ	ポリ塩化ビニル

#### 【使用目的又は効果】

\*\* 一般医療機器と雑品等を組合わせてプレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

#### 【使用方法等】

滅菌容器から取り出し、不潔にならないように注意しながら使用する。各構成品は、その使用用途から逸脱しない範囲で使用する。

#### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・包装が破損、汚損、または濡れている場合は使用しないこと。
- ・滅菌インジケータに異常があるものは使用しないこと。
- ・開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)
- ・使用後破棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・滅菌期限内に使用すること。
- ・構成品は体内に留置しないこと。

〈不具合・有害事象〉

- \* アレルギー反応、皮膚炎、痒み、かぶれ、発赤、蕁麻疹

#### 【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・有効期間：容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市区笠取町3-415

TEL 052-522-5226