

## 滅菌挿入ガーゼ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・ 包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は使用しないこと。
- ・ 開封後は全量を消費すること。(滅菌状態が保てないため)
- ・ 使用後廃棄する場合には、汚染箇所への接触および汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・ 滅菌期限内に使用すること。

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### \*\*■ 形状

綿 100% のガーゼ製品。白い布で、におい及び味はない。本品はエチレンオキサイドガス滅菌済みである。

#### \*\*■ 材質

セルロース

#### \*\*■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### \*【保管方法及び有効期間等】

- ・ 保管方法：直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- \* ・ 有効期間：容器又は被包に表示【自己認証（自社データ）による】

### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市西区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226