

医 0 4 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 1 3 7 0 0 0 0 0

アダチ尺角ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

* 【形状・構造及び原理等】

* ■ 形状

綿 1 0 0 % のガーゼ。本品は、白い布で、におい及び味は無い。

* ■ 材質

セルロース

* ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する事を目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

- ・ 使用目的に応じ、適宜使用する。
- ・ 創傷面には滅菌して使用する。
- ・ 滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・ 本品の使用は一回限りです。再使用しないこと。
- ・ 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。
- ・ 使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社エフスリー

愛知県名古屋市区笠取町 3-415

TEL 052-522-5226