

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 脱脂綿

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 体内に留置しないこと

### 【使用方法等】

- ・ 使用目的に応じ、適宜使用する。
- ・ 滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。
- ・ 再滅菌しないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### \* ■ 形状

綿100%の脱脂綿。白色の繊維状の軟毛で、  
におい及び味はない。

#### \* ■ 材質

セルロース

#### \* ■ 原理

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性  
を有し、液体の吸収を行う。

### \*【使用上の注意】

- \* ・ 包装が破損、汚損、または水濡れしている場合は  
使用しないこと。
- \* ・ 使用后破棄する場合には、汚染箇所への接触およ  
び汚染物の飛散防止に十分注意すること。
- ・ 開封後は早めに使用すること。

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸  
収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿織  
維から成る材料をいう。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に  
保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

**株式会社エフスリー**

愛知県名古屋市西区笠取町3-415

TEL 052-522-5226