

チケア[®]

Chi-care[®]

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止[感染の危険性があるため]
- 2) 併用禁忌
本品にアルカリ性水溶液を使用しないこと。[アルギン酸カルシウムはアルカリ性溶液に溶けるため]

【形状・構造及び原理等】

本品は、アルギン酸カルシウム繊維からなる白色～淡黄白色のメッシュ状の不織布であり、創部からの血液や滲出液を吸収することにより、網状構造のゲルを形成し、創部の保護ならびに湿潤環境を形成、維持する。

滅菌済み製品であり、単回使用製品のため、再使用禁止。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

【使用方法等】



1.使用方法等に関連する使用上の注意

- 1) 本品は滅菌済みですので、開封後は速やかに使用してください。一度使用した本品を再使用しないでください。
- 2) 本品を使用する際に切ったり、繊維をほどいたりしないでください。

2.使用方法

鼻出血への使用

- 1) 前かがみになり、凝血塊を取り除くため、やさしく鼻をかんでください。
- 2) 本品を取り出し、よじるか、折りたたんだ後、鼻腔へ挿入します。
- 3) 挿入後30分以内に親指と人差し指で本品を挟んで鼻腔から取り出してください。
- 4) 出血が続く場合は、新たに本品を開封し、再度、鼻腔へ30分間挿入してください。

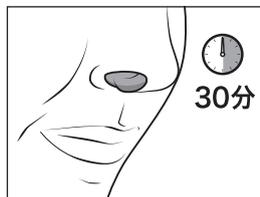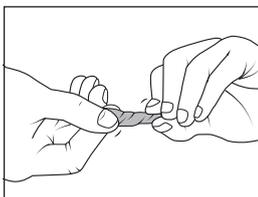

N17CHI01B

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- 1) 本品に対してアレルギーが認められる場合は、本品の使用を中止すること。
- 2) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ、痛み等が生じた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- 3) 使用前に軟膏剤やその他の医薬品を塗布しないこと。製品の性能を阻害する可能性がある。
- 4) クロロヘキシジン及び塩化ベンザルコニウム等の消毒剤や次亜塩素酸ナトリウムなどのアルカリ溶液を使用した場合は、本品を使用する前に水道水などでよく洗い流すこと。
- 5) 本品を数回使用した後も出血が止まらない場合は、医師に相談すること。

2.その他の注意

- 1) 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されているが、使用時に包装が破損または汚損している場合には使用しないこと。
- 2) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 3) 本品を再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

2.使用期限

製品包装に記載(自己認証による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名：株式会社エムビーエス

*住所：〒101-0021 東京都千代田区外神田6-16-3 外神田MNビル

販売会社名：第一医科株式会社

TEL：03-3814-0111(代表)

製造元：Les Laboratoires Brothier(レ・ラボラトワール・プロティエ)

製造国名：フランス