

無菌水装置 アクアピュアリー スクラブユニット


【警告】

- 本装置は手洗以外に使用しないこと。
特に治療や患部・器具の洗浄等には使用しないこと。
- 異なる薬液同士（サニフル 10、次亜塩素酸ナトリウム スケール除去剤）は混ぜないこと。
化学反応により有毒ガスが発生したり、殺菌効力を失う。
- 改造は行わないこと。

【禁忌・禁止】

- ステリシャワー用殺菌灯の交換の時は、ブレーカーを切り、10 分以上経過してから行うこと。
- 当社指定以外の消毒剤を使用した場合、装置の構成機材が腐食したり、消毒剤が凝固することがある。
当社指定以外の消毒剤を使用する場合は、性状や特質をよく検討の上、使用すること。
- 長時間電源を入れたままでシャワーを使用しなかった時、殺菌灯によって加熱された温度の高いシャワー水が出ることもあるので、2~3 秒シャワーを流してから使用すること。
- 前面パネルには水をかけないこと。
パネル部には電子部品があり、水がかかると漏電や故障の原因になる。
- 溜り水の菌増殖を防ぐため、装置を使用しない日でも 1 日 3 回（朝一番・昼・夕方）1 回につき 1 5 分水を流すこと。
- 装置から 4 日以上水を出さなかった時は、水回路の消毒を行ってから使用すること。
- 菌検査用のサンプル水を採取する時は 1 5 分水を流した直後に採取すること。

【形状・構造等】

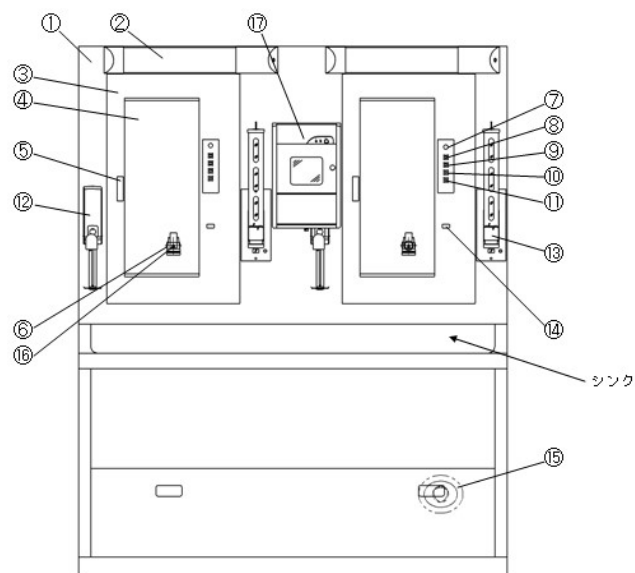

符 号	名 称	符 号	名 称
1	前面パネル	11	電源スイッチ
2	蛍光灯	12	オートクリーン(センサー式)
3	前面扉	13	ブラシケース(センサー式)
4	鏡	14	光電センサー
5	平面タッチ	15	ミキシングバルブ
6	ステリシャワー	16	点検孔(ステリシャワー用)
7	ヒューズ(サーキットプロテクタ)	17	※ ソルスパタオールホルダー
8	シャワー殺菌灯スイッチ		
9	マニュアルスイッチ		
10	オートスイッチ		

※ 1 人用、2 人用、3 人用共通です。（図は 2 人用です。）

※ ソルスパタオールホルダーはオプションです。

【性能、使用目的、後納又は効果】

本装置は術前、術後に使用する手洗い用無菌水製造装置である。

【操作方法又は使用方法等(用法・容量を含む)】

以下の手順の詳細は取扱説明書の「15. 使用方法」を参照のこと。

- ① 電源スイッチを押す。(電源ランプ点灯)
- ② マニュアル・オート切替スイッチを「オート」にする。
このスイッチは通常はOFF 時も含めて「オート」にしておくこと。
- ③ 電源ランプ点灯後、光電センサーに手をかざすと、無菌水が流れる。
- ④ 再度、光電センサーに手をかざすと無菌水が止まる。
- ⑤ マニュアル・オート切替スイッチを「マニュアル」側にすると無菌水は出たままになるので、連続して水を出す時に使用する。又、光電センサーの故障時、手動で水を出す時にも使用できる。
切替スイッチを「OFF」にするとシャワーから水は出なくなる。
- ⑥ 使用後は電源スイッチを押し、電源を切る。
(ステリシャワーの殺菌灯は連続点灯のため、電源を切っても消灯しない)
- ⑦ ステリシャワースイッチはステリシャワー内の殺菌灯を ON・OFF させるスイッチで、電源スイッチとは独立しているので殺菌灯の交換時以外は操作しないこと。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の「6. から 9. の注意事項」を参照のこと。

- 初めて使用する時は、
 - ①限外濾過膜にホルマリンが付着しているので 5 分間水を流してから使用すること。
 - ②試運転を行ってから使用すること。
(14. 「試運転」の項参照)
 - ③回路消毒を行うこと。
(16. 「消毒及びスケールの除去について」の項参照)
- 1 週間以上使用しなかった時は、水系回路の消毒を行ってから使用すること。又、試運転を行い正常に作動することを確認してから使用すること。
- 1 日～3 日間装置を使用しない日でも、溜り水の菌増殖を防ぐため、1 日 3 回 (朝一番・昼・夕方) 1 回につき 1 5 分水を流すこと。
- 1 日の使用開始時には、朝 1 5 分水を流すこと。尚、前日装置使用をしなかった時は 3 0 分水を流すこと。
- 定期的な保守・点検を行い、常に装置を最良の状態で使用すること。
- 装置の故障と思われる時は、取扱説明書の「26. 修理を依頼される前に」に従ってチェックし、それでも回復しない場合は、販売店かメーカーへ連絡すること。

【作動・動作原理】

殺菌水の製造方法は 1 μ プレフィルタと 0.01 μ 限外濾過膜による濾過方式を組み合わせた方法により製造する。

【保守・点検に関する事項】

詳細は取扱説明書の「23. 保守・点検について」を参照のこと。

- ステリシャワーの殺菌灯
[前回の交換から半年後]
半年経っていたら殺菌灯を交換
- 限外濾過膜
[前回の交換から半年から一年後、又はシャワーの出が悪くなった時]
半年以上経っていて濾過膜が詰まってシャワーの出が悪くなったら交換する。
- スケールの除去
[一年に一度]
取扱説明書の「16. 消毒及びスケールの除去」による
- 水回路の消毒
[一週間～一ヶ月に一度]
消毒の頻度は水質、使用頻度によって異なります。

【包装】

1 台

【製造業者又は輸入販売業者の氏名または名称及び住所等】

製造業者

名 称:株 式 会 社 英 技 研
住 所:群馬県佐波郡玉村町大字上之手 1717-2
電話番号:0 2 7 0 - 6 5 - 3 1 6 2