

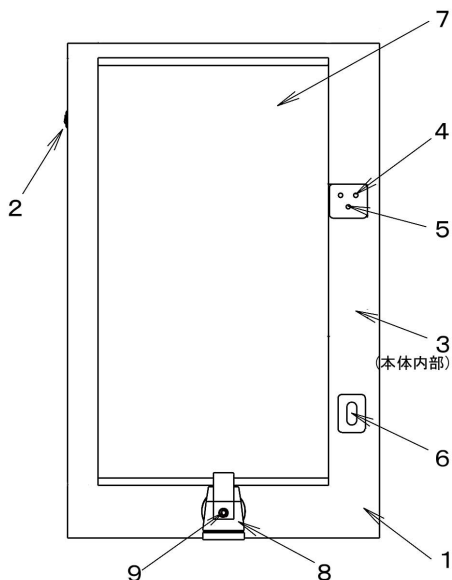
ピュアスクラブ MRE-SFM-1K

警告

- 本装置は手洗以外に使用しないこと。
- 特に治療や患部・器具の洗浄等には使用しないこと。
- 異なる薬液同士（サニフル 10、次亜塩素酸ナトリウム・スケール除去剤）は混ぜないこと。（化学反応により有毒ガスが発生したり、殺菌効力を失う）
- 改造は行わないこと。

【禁忌・禁止】

- 殺菌灯は長時間直視しないこと。
- 長時間電源を入れたままでシャワーを使用しなかった時、殺菌灯によって加熱された温度の高いシャワー水が出るがあるので、2～3秒シャワーを流してから使用すること。
- 殺菌灯及びステリシャワー用殺菌灯の交換の時は、ブレーカーを切り、10分以上経過してから行うこと。
- フィルターケース脱着の際には、ハンドルを回した時に他の部品とハンドルとの間に指を挟まないようにすること。
- フィルターの交換などで扉を開けるときは、鏡をはずさずに90°以内をまもること。

【形状・構造等】

符号	名 称	符号	名 称
1	本体カバー	6	光電センサー
2	電源スイッチ	7	鏡
3	電源部	8	ステリシャワー
4	殺菌灯時間計	9	点検孔（ステリシャワー用）
5	時間計リセットスイッチ		

【性能、使用目的、効能又は効果】

本装置は術前、術後に使用する手洗い用殺菌水装置である。

【操作方法又は使用方法(用法・容量を含む)】

以下の手順の詳細は取扱説明書の「14. 使用方法」を参照のこと。

- ① 漏電ブレーカーを入れる。
- ② 電源ランプ点灯後、光電センサーに手をかざすと殺菌水が流れる。
- ③ 再度、光電センサーに手をかざすと水が止まる。

【使用上の注意】

詳細は取扱説明書の「8. 9. 10. 11. の注意事項」を参照のこと。

- 装置に使用する水質基準は、日本薬局方・常水・純度試験に合格した水及び温水を使用すること。
- 装置に貼られた警告・注意書き及び取扱説明書に記載された警告には十分に注意を払うこと。
- 装置の改造は行わないでください。改造の必要がある場合はメーカーに相談すること。
- 初めて使用される時は、精密濾過膜に過酸化水素水が付着しているの、5分間水を流してから使用すること。
- 長時間電源を入れたままでシャワーを使用しなかった時、殺菌灯によって加熱された温度の高いシャワー水が出るがあるので、火傷をする程ではないが、2～3秒シャワーを流してから使用すること。
- 長期間使用しなかった時は、水系回路の消毒を行ってから使用すること。
- 定期的な保守・点検を行い、常に装置を最良の状態で使用すること。
- 装置の故障と思われる時は、取扱説明書の「21. 修理を依頼される前に」に従ってチェックし、それでも回復しない場合は、販売店かメーカーへ連絡すること。

【作動・動作原理】

精密濾過膜（孔径0.1μm）2本による除菌方式により無菌水を製造する。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**● 使用環境条件**

周囲温度	10～40℃
周囲湿度	35～85%

● 保管環境条件

周囲温度	5～50℃（凍結なきこと）
周囲湿度	20～90%（結露なきこと）

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保守点検に関する事項】

詳細は取扱説明書の「18. 保守・点検について」を参照のこと。

- 使用時間計の指示値
[電源スイッチを入れた時]
5000 時間以上の場合は殺菌灯を交換する。
- ステリシャワーの殺菌灯
[前回の交換から半年後]
半年経っていたら殺菌灯を交換する。
- 精密濾過膜
[前回の交換から半年から一年後、又はシャワーの出が悪くなった時]
- スケールの除去
取扱説明書の「13. 消毒方法及びスケール除去剤の使用法」による。

【包装】

1 台

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造業者

名 称 : 株 式 会 社 英 技 研
住 所 : 群馬県佐波郡玉村町上之手 2 1 1 0 - 3
電話番号 : 0 2 7 0 - 6 5 - 3 1 6 2