

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 (70948009)

MPI ファイバーオプティック喉頭鏡

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1.本製品は絶対に超音波洗浄器・乾熱滅菌器を使用しないこと。
- 2.本製品のハンドルを洗浄・消毒・滅菌する前には、必ず電池を取り出すこと。
- 3.ディスポーザブル製品（ブレード）は再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状

ブレード：ディスポーザブル・マッキントッシュ型ブレード

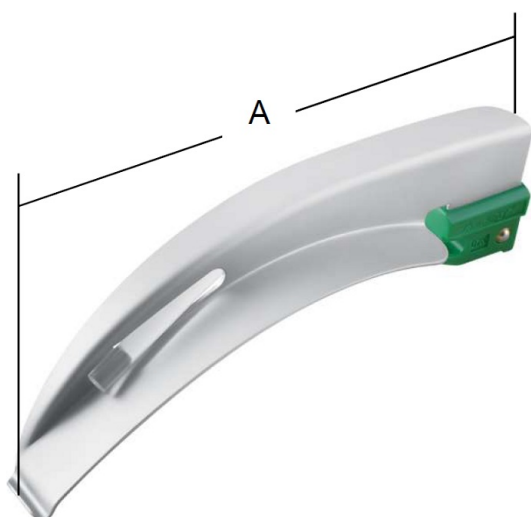

構造・構成ユニット

(寸法単位：mm)

名称	A
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ0	80
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ1	90
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ2	100
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ3	130
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ3.5	144
ディスポーザブル・マッキントッシュ型 ブレード サイズ4	153

作動・動作原理

ハンドルにブレードを装着すると導通し点灯する。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具であり、咽頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1.ハンドルに応じた乾電池を挿入する。
- 2.使用前に、ランプが点灯することを確認する。
- 3.ハンドルにブレードを装着する。このとき、ブレード先端から観察用の照明光が出ることを確認する。
- 4.使用後はハンドルからブレードを外す。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.ランプ点灯時、ブレード末端部のファイバー面に黒い点や暗い部分がある場合は使用を中止すること。
- 2.廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.水のかからない場所に保管すること。
- 2.気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 3.傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- 4.化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 5.使用期限は製品の包装を参照すること。

【保守・点検に係る事項】

本製品は単回使用です。滅菌、消毒は出来ません。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
株式会社エム・ピー・アイ
TEL: 03-3451-6501

＜製造業者＞
メディカルデバイス社（パキスタン）
Medical Device (Pvt) Ltd.