

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

MPI ミラー型喉頭鏡ブレード

【禁忌・禁止】


本製品は絶対に超音波洗浄器・乾熱滅菌器を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状

材質：ステンレススチール

外観

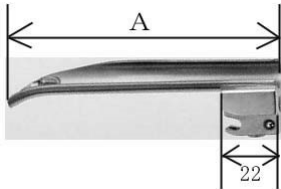

品名	製品番号	A寸法
MPI ミラー型ブレード サイズ0	1-101-00	75mm
MPI ミラー型ブレード サイズ1.5	1-101-15	110mm
MPI ミラー型ブレード サイズ2	1-101-02	150mm

作動・動作原理

喉頭にブレードを挿入して、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりする。

【使用目的又は効果】

麻酔又は救急医療等で、気道確保のために気管（人の気道）への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いる器具であり、咽頭及びその周辺の観察、診断、治療にも用いる。ハンドル及びブレードから成り、照明装置を内蔵する。

【使用方法等】

使用方法

- 1.ハンドル（※）にブレードを取り付ける。
- 2.ランプが確実に点灯することを確認する。

再使用のために必要な処置

- 1.推奨滅菌方法：高圧蒸気滅菌
- 2.推奨滅菌条件：温度 132℃、時間 4 分又は
温度 121℃、時間 30 分

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.トレーニングを受けた医療専門家以外は使用しないこと。
- 2.使用目的（喉頭展開）以外の目的で使用しないこと。

- 3.ランプ点灯時、ブレード末端部のファイバー面に黒い点や暗い部分がある場合は使用を中止すること。
- 4.廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

併用医療機器

販売名「グリーンライン・ファイバーオプティック喉頭鏡」（届出番号：13B1X00118SUN001）のハンドルを使用する。本品は、滅菌して使用する。洗浄・滅菌して繰り返し使用する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.消毒後、完全に乾燥した後保管すること。
- 2.水のかからない場所に保管すること。
- 3.気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 4.傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- 5.化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- 1.汚れのこびり付きを防ぐため、使用後は速やかに洗浄液に浸し、柔らかいブラシ等で丁寧に洗い、蒸留水で良くすすいでから、柔らかい布で水分を拭き取って下さい。
- 2.薬液消毒は、濃度や浸け置き時間を、薬液メーカーの指示に従って行い、蒸留水ですすぎ、滅菌布で拭き、乾燥させて下さい。
- 3.滅菌は、オートクレーブで、132℃・4分又は121℃・30分行って下さい。
【注意】絶対に超音波洗浄器・乾熱滅菌器を使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社エム・ピー・アイ

*TEL：03-3451-6501

<外国製造業者>

Medical Devices (Pvt) Ltd. (パキスタン)

メディカル デバイス