

一般医療機器 医 04 整形用品
医療用不織布 JMDN34655000

メディコム 不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布ガーゼで不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやすくしている。
- 使い捨てタイプ

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

【使用方法等】

未滅菌の為、適宜滅菌してご使用ください。

【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- 箱又は包装等に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
- 肌の弱い方の場合、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内に留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

2. 有効期間

- 上記条件のもとで包装後 3 ヶ年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023

兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル9F

TEL 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国

外国製造業者：A. R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.