

一般医療機器 医 04 整形用品
医療脱脂綿 JMDN70975000

セーフロール

(滅菌済み)

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 綿100%素材のロール綿で酸化エチレンガスによる滅菌処理を行っている。(国内滅菌)
- 使い捨てタイプ
- 10 mm径の円柱形ロール
- 天然綿の吸水性を利用し体液等を吸収する。

【使用目的又は効果】

患者の体表から少量の体液を吸収したり、口腔内の容積を確保する等、主にデンタル用の医療目的に使用する。

【使用方法等】

滅菌済みのブリスターパックより汚染されないように取り出し患者の体液等の吸収や、口腔内の容積の確保に使用する。

【使用上の注意】

「重要な基本的注意」

- 本品は使い捨ての為、再使用はしないでください。
- 包装袋に開封、破損、汚染等が見られる場合は滅菌済み製品としての使用はしないでください。
- 肌の弱い方は、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状が現れた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
- 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
- 体内に留置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- 本品は滅菌済みの製品なので、個包装を破らないように保管してください。

2. 有効期間

- 包装袋に表示。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
〒650-0023
兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10読売神戸ビル9F
EL. 078-327-2333

外国製造所国名：中華人民共和国
外国製造業者：A. R. Medicom Inc. Shanghai Ltd.