

一般医療機器 医 04 整形用品
医療用不織布 JMDN34655000

メディコム バイタル 不織布ガーゼ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 破損使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- ポリエステル及びビスコースレーヨン素材混紡の不織布ガーゼで不織布の網目構造により血液・体液等を吸収しやすいもの。

【使用目的又は効果】

- 創傷面の保護、血液・体液等の吸収または薬剤の塗布等に使用する。

【使用方法等】

- 適宜滅菌してご使用ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 本品は使い捨てですので、再使用しないでください。
 - 箱に開封、破損、汚染等が見られる場合は使用しないでください。
 - 肌の弱い方の場合は、かゆみ、かぶれ等を生じることがあります。このような症状があらわれた時は、使用を中止し、医師に相談してください。
 - 開封後はできるだけ速やかにご使用ください。
 - 体内へ留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - 直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
2. 有効期間
 - 製造後 3 年

【製造販売業者及び外国製造所国名】

- 製造販売業者
 - A. R. メディコム・インク・アジア・リミテッド
 - 〒650-0023
 - 兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目 2 番 10 号読売神戸ビル 9 階
 - TEL 078-327-2333
- 外国製造所国名
 - 中華人民共和国